

 Axi2Go Kom i gang


AXI2GO



- NO** Om nødvendig, sett inn en mynt i myntinnkastet (A) og løsne Axi2Go.
- SE** Om det behövs, sätt i ett mynt i myntinkastet (A) och frigör Axi2Go.
- DK** Om nødvendig, indsæt en mønt i møntindkastet (A) og frigør Axi2Go.



- NO** Plasser bagasjen på bagasjehyllen (B) (hvis tilstede).
- SE** Placera ditt bagage på bagagehyllan (B) (om sådan finns).
- DK** Placer din bagage på bagagehylden (B) (hvis tilgængelig).

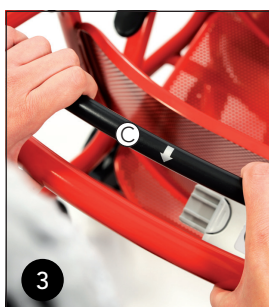

- NO** Du kan frigjøre Axi2Go sin brems ved å trykke den svarte bremsebøylen (C) nedover og holde den nede. Så snart du slipper bøylen, aktiveres bremsene igjen.
- SE** Du kan lossa Axi2Go:s broms genom att trycka ner den svarta bromsbågen (C) och hålla den nere. Så snart du släpper bromsbågen, aktiveras bromsarna igen.
- DK** Du kan frigjøre Axi2Go's bremse ved at trykke den sorte bremsebøjle (C) nedad og holde den nede. Så snart du slipper bøjlen, aktiveres bremserne igen.



Axi2Go Kom i gang



- NO** Personen kan nå sette seg. Før du begynner å bevege deg, skal føttene være på fotstøtten **D**.
- SE** Personen kan nu sätta sig. Innan du börjar köra, ska fötterna vara på fotstödet **D**.
- DK** Personen kan nu sætte sig. Inden du begynder at køre, skal fødderne være på fodstøtten **D**.

4



- NO** Du kan komme deg over hindringer ved å trække på vippepedalen **E** samtidig som du presser håndtaket nedover med hendene. Deretter kan du trille Axi2Go over forhøyningen.
- SE** Du kan ta dig över hinder genom att trycka på tipp-pedalen **E** samtidigt som du trycker ner handtaget med händerna. Därefter kan du rulla Axi2Go över upphöjningen.
- DK** Du kan komme over forhindringer ved at træde på vippepedalen **E** og samtidig trykke skubbebøjlen nedad med hænderne. Derefter kan du trille Axi2Go hen over forhindringen.

5



- NO** Etter bruk, parker Axi2Go (og hent mynten din).
- SE** Efter användning, parkera Axi2Go (och hämta ditt mynt).
- DK** Efter brug, parker Axi2Go (og hent din mønt).

6



- Merk:** Du kan gå opp en bakke forover, men det er bedre å gå ned bakken baklengs.
- Observera:** Du kan gå uppför en sluttning framåt, men det är bättre att gå nedför baklänges.
- Bemærk:** Du kan gå op ad en bakke forlæns, men det er bedre at gå ned ad den baglæns.



- Merk:** Bruk aldri slipende eller aggressive rengjøringsmidler eller løsemidler som tynner, rensed bensin eller lignende.
- Observera:** Använd aldrig slipande eller aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel såsom thinner, kemtvättsnåfta eller liknande.
- Bemærk:** Brug aldrig slibende eller aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler såsom fortynder, rensed benzin eller lignende