



Invendig avkalkning av bidetenhet

Utförs vid behov · Tidsåtgång ca. 30 min · Kräver: Durgol 125 ml

Bidetsitsen har ett **inbyggt automatiskt avkalkningsprogram**. Använd endast Durgol avkalkningsvätska för Geberit AquaClean (125 ml). Programmet startar automatiskt när locket sätts tillbaka.



1 Ta bort locket

Håll i båda sidorna och dra locket mot dig. Det sitter i clips — det kräver lite kraft.



2 Lyft av locket

Lyft locket uppåt och lägg det åt sidan. Vattentanken med påfyllningsöppning är nu synlig.



3 Ta bort proppen

Ta ut den vita proppen ur öppningen till vattentanken. Lägg proppen åt sidan — den ska användas igen.



4 Fyll på Durgol

Häll 125 ml Durgol i öppningen på vattentanken. Tanken är full när vätska rinner ned i skålen.



5 Sätt tillbaka proppen

Sätt tillbaka proppen och tryck fast den ordentligt så att den sitter tätt.



6 Sätt på locket

Sätt locket på plats och tryck fast det. Avkalkningsprogrammet startar automatiskt.

FÖRLOPP

Pumpar vätska
~2 min

Löser upp kalk
~15 min

Sköljer igenom
~15 min

Klar
✓



Viktigt: När programmet har startat kan det **inte avbrytas**. Tvätt- och torkfunktioner är **otillgängliga** under hela förloppet (ca. 30 min.).



Manuell rengöring av munstycksarm

Utförs regelbundet · Tidsåtgång ca. 5 min · Kräver: Gammal tandborste + ättikspit



1 Tryck på knappen 2× snabbt

Tryck snabbt två gånger på den **grå multifunktionsknappen** (markerad med röd cirkel) på sidan av bidetenheten. Munstycksarmen körs automatiskt ut.



2 Rengör armen

Använd en gammal tandborste med ättikspit för att rengöra munstycksarmen grundligt.

💡 Munstyckshuvudet kan dras av i samma riktning som munstycket pekar. Skölj det under rinnande vatten.



3 Avsluta rengöring

Armen dras automatiskt in igen efter **5 minuter** — eller tryck på knappen **1× för att avsluta** manuellt.



Automatisk påminnelse: Produkten påminner dig själv om att genomföra avkalkningsprogrammet **var 4:e månad**. Du kommer att se att ljuset inne i toaletten börjar **pulsera** — det är signalen om att det är dags för avkalkning.



SE VIDEOGUIDE

Skanna QR-koden för att se en video av processen.