

ANVÄNDARMANUAL **CLEAN COMFORT VÄGGHÄNGD**

801665 Vit
801666 Grå
801667 Antracit



Introduktion.....	3
Säkerhetsföreskrifter.....	5
Specifikationer.....	6
Tekniska ritningar	7
Bidéöversikt	8
Fjärrkontroll Clean Comfort.....	9
One-Touch-kontroll för Clean Comfort.....	10
Användarinstruktioner och inställninga.....	11
Skötsel, service och rengörng.....	17
Start och fjärrkontrollsparning.....	25
Felsökning.....	27
Reservdelar.....	29
Placering av produktmärkning och identifiering.....	29

Bano Clean Comfort vägghängd

Den vägghängda Clean Comfort-toaletten är en integrerad spol- och torktoalett, designad för användning med inbyggda cisterner. Den kombinerar nödvändig funktionalitet med flexibel installation, vilket säkerställer att hjälpmedel kan vara både praktiska och stilrena. Med sitt IPX6-vattenskydd kan den installeras säkert i våtutrymmen, även i duschzonen, vilket gör den idealisk för små badrum och våtrum. Den robusta konstruktionen gör det även möjligt att använda toaletten som en säker duschstol, vilket ger en tryggare och mer tillgänglig badrumsupplevelse.

Designad för självständighet och tillgänglighet

Skapad för att stödja självständig intimhygien, innehåller Clean Comfort-toaletten funktioner anpassade för:

- Användare med nedsatt rörlighet: Intuitiva kontroller och justerbara inställningar gör den lätt att använda.
- Personer med reducerad sittstabilitet: Ger stabil sittställning både vid toalettbesök och sittande duschning.
- Platsbesparande lösningar: Perfekt för små badrum där toalett och dusch är nära varandra.
- Vårdarvänlighet: Minskar behovet av riskfyllda förflyttningar och underlättar assistans.

Hygienisk och hållbar konstruktion

- Hygieniska material: Tillverkad av lättstädad plast och porslin.
- Hållbar design: IPX6-klassningen säkerställer långvarig funktion även i våtrumsmiljöer.
- Stark konstruktion: Porslinsskålen är robust och utformad för att klara en användarvikt på upp till 200 kg.

Förbättrade komfortfunktioner

- Oppvarmet sete: Gir varme og trygghet.
- Nattlys: Integrert i bidetsetet for praktisk bruk om natten.



Luktstyrning och intelligent spolning

- Inbyggt luftfilter: Avlägsnar lukt direkt från skålen för en fräschare badrumsmiljö.
- Anpassningsbar spol och torkning:
 - Manuella alternativ: bakre spol, främre spol, torkning.
 - Automatiska program: kombinerad spol och torkning, anpassad för både män och kvinnor.
- Både manuella och automatiska tvättprogram har intuitiva inställningsmöjligheter:
 - Justerbar vattentemperatur, vattenmängd och munstycksposition
 - Pulsering och rörligt munstycke
 - Justerbar lufttemperatur och luftmängd

Enkel styrning med fjernkontroll



- Både standard-fjärrkontrollen och den intuitiva fjärrkontrollen ger enkel åtkomst till två automatiska program, stoppfunktion och torkning – idealiskt för användare med nedsatt rörlighet.
- Ett valfritt vridreglage på sitsens sida kan också användas för att styra bidén.

Flexibel placering med IPX6-skydd

Med sitt IPX6-vattenskydd erbjuder toaletten:

- Möjlighet att placeras i duschzonen för extra bekvämlighet
- Dubbel användning som duschstol, vilket ökar säkerhet och självständighet
- Driftsäkerhet även vid vattenexponering, utan att kompromissa med elsäkerhet

Clean Comfort vägghängd spol och torktoalett kombinerar funktionalitet, stil och tillgänglighet. IPX6-skyddet möjliggör flexibel installation, även i duschområdet. Den är utformad för att främja självständighet, hygien och komfort – en idealisk lösning för äldre och personer med funktionsnedsättning.

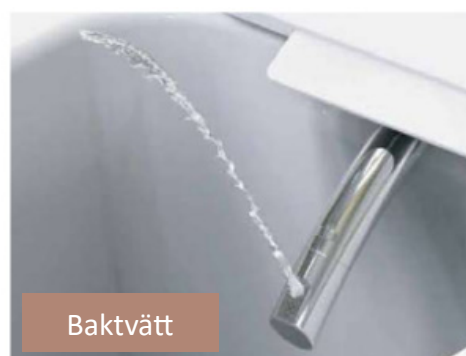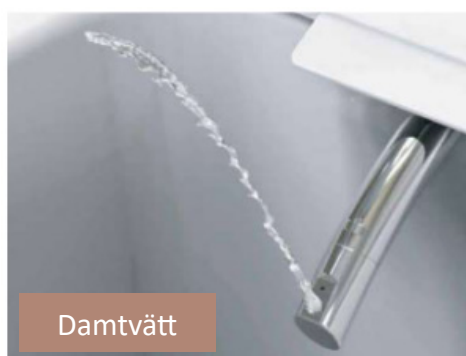

Leverantören ansvarar inte för någon förlust som uppstår på grund av att följande instruktioner inte följs:




- Denna utrustning är en elektrisk apparat av typ '1' och måste vara helt ansluten till jordningssystemet.
- Denna utrustning är en elektrisk apparat och bör därför inte installeras på en plats där den lätt kan stänka med överflödigt vatten utanför dess användningsgränser eller utsättas för hög temperatur. Installera en fläkt eller ventilationsöppning i badrummet för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas och får instruktioner om säker och korrekt användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med det. I sådana fall rekommenderas att använda lågt flöde/tryck och låg temperatur.
- Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten kommer att vara permanent ansluten till vattenförsörjningen. Vattenförsörjningen bör endast kopplas bort för installation och underhåll.




- Sätt inte i eller dra ur nätkontakten med våta händer. Annars finns risk för elektrisk stöt.
- Skada inte nätsladden och kontakten. Annars finns risk för elektrisk stöt, kortslutning och brand.
- Använd inte uttaget om det sitter löst och se till att allt är korrekt anslutet, annars finns risk för elektrisk stöt och brand.
- Strömförsörjningen måste användas enligt föreskrifter. Annars finns risk för skador på produkten och risk för brand eller elektrisk stöt.
- Demontera, reparera eller montera inte ihop produkten. Annars finns risk för elektrisk stöt och brand.
- Placera inte hög värme eller öppen låga nära produkten. Annars finns risk för brand.
- Se till att inte sprida vatten, rengöringsmedel eller organiskt material på nätkontakten. Annars finns risk för elektrisk stöt, skador på produkten eller brand.
- Vänd inte produkten upp och ner eftersom det kan orsaka skador.
- Böj eller förvräng inte inloppsslangen eftersom det kan orsaka skador och läckage.
- De nya slangseten som medföljer apparaten ska användas. Det rekommenderas inte att använda äldre befintliga slangar.

Tvätta	Baktvätt	✓
	Främre damtvätt	✓
	Massage	✓
	Justerbar vattentemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
	Justerbar flödeshastighet	AV/5 steg (standard 3:e)
	Justerbar sprayposition	AV/5 steg (standard 3:e)
Varm luft	Lufttorkning	✓
	Justerbar lufthastighet	5 steg (standard 3:e)
	Justerbar torktemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
Uppvärmd sits	Uppvärmd sits	✓
	Justerbar sitstemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
Hygien	Deodoriser	✓
	Munstycke automatisk rengöring	✓
	Munstycke Manuell rengöring	✓
Avkalkning		✓
Användarlägen		2 användare
Nattljus		✓
Indikatorlampa (vred)		✓
Mjukstängande sits och lock		✓
Roterande kontrollratt		✓
Kantlös toalett		✓
Installationstyp		Vägghängd
Anslutning av vattenförsörjning		G 1/2
Märkspänning		AC220-240V, 50/60Hz
Effekt		1170W
Längd på nätsladden		1.8m
Vattentillförseltryck		0.07-0.75MPa (0.7-7.5Bar)
Vattentillförseltemperatur		4-35°C
Omgivningstemperatur		4-40°C
Skyddsgrad		IPX6
Tvätta enheten	Flödeshastighet	350-650mL/min
	Vattentemperatur	31-39°C
	Tvättcykeltid	3 minutes
	Uppvärmningsläge	Tank
	Värmarens effekt (vatten)	1200W
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/vätskenivåbrytare/termostat
	Backflow Prevention	Luftspalt, AB-typ
Torr enhet	Lufthastighet	≥ 4m/S
	Tork effekt	350W
	Torrcykeltid	3 minuter
	Varm lufttemperatur	35-50°C
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/termostat
Deodorisering	Deodoriseringsläge	Diatom
	Deodoriseringscykeltid	15 minuter
Uppvärmd sits	Värmare effekt	50W
	Sätetemperatur	29-37°C/AV
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/termostat
Fjärrkontroll	Frekvensintervall	2460MHz
	Maximal RF-utgångseffekt	-9.04dBm
	Antal/typ av batterier	3V CR2032 - 2 stycken
Andra säkerhetsanordningar		Jordfelsbrytare
Max användarvikt		200kg
Vikt av wc-skål och spol-/torksits		31.5kg

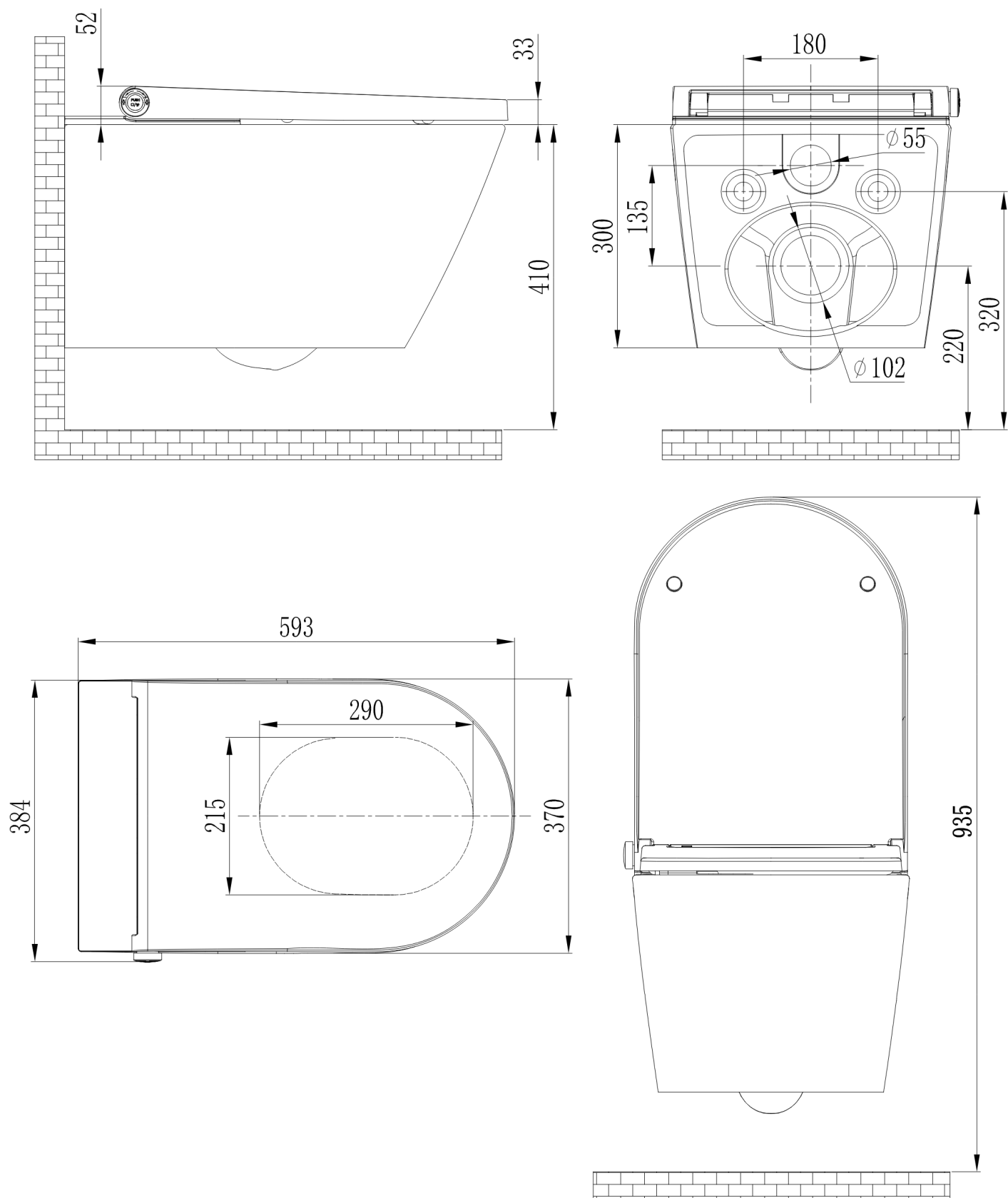


Alla mått är i mm

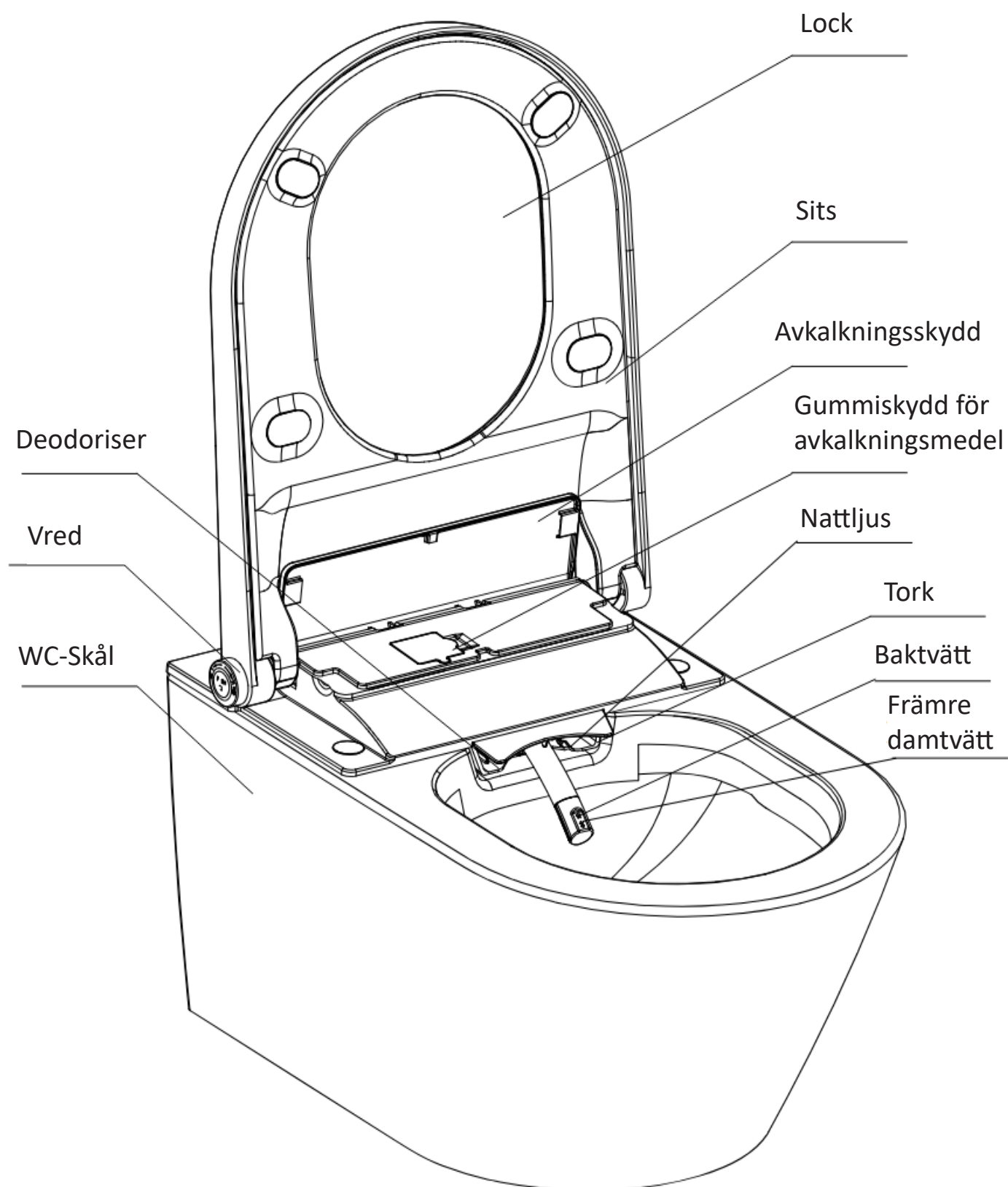


Bilderna är endast för referens.

Fjärrkontroll Clean Comfort (801686) (Standard)

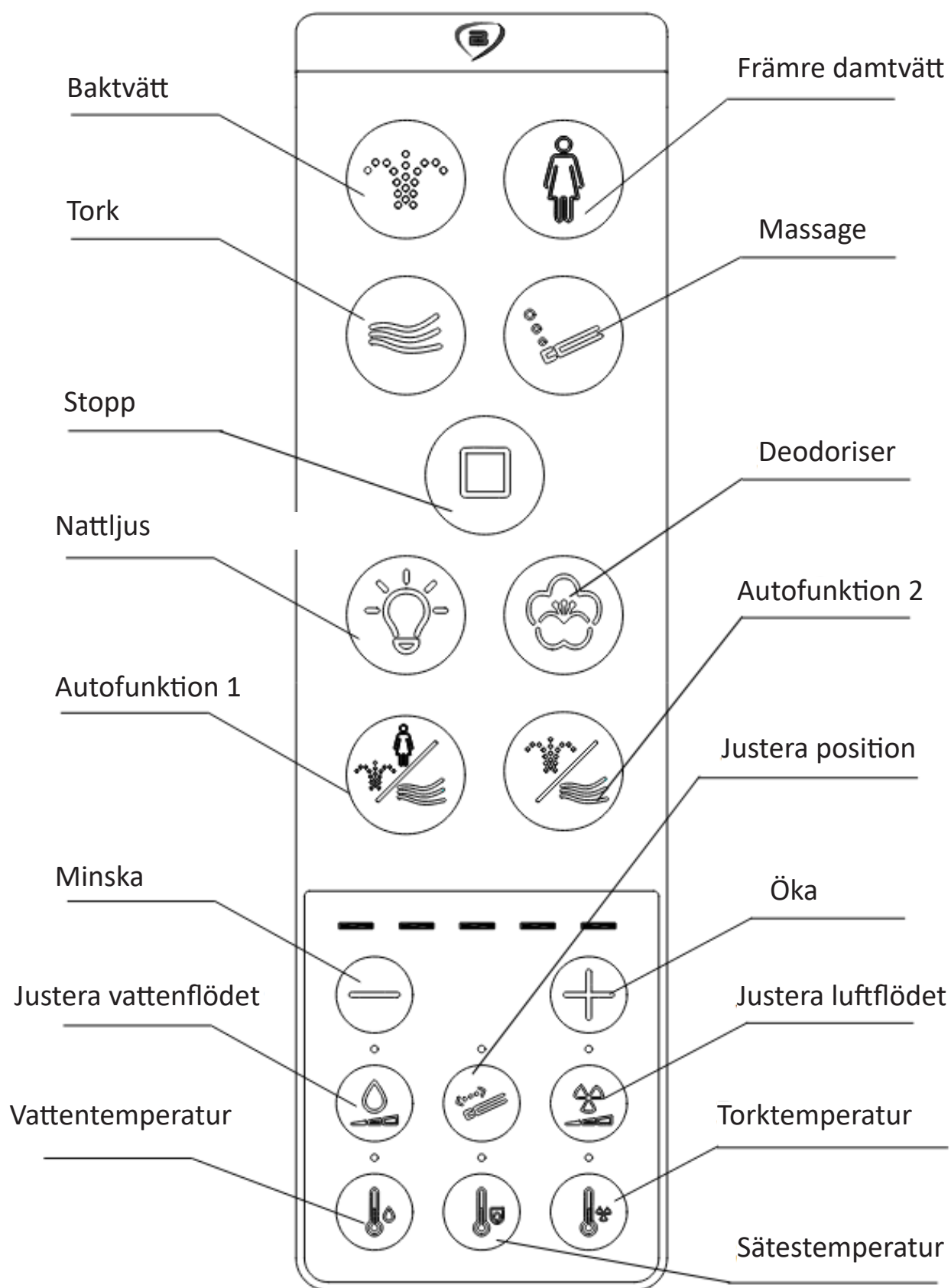

Fjärrkontrollen kräver batterier (2x 3V CR2032)

One-Touch Kontroll för Clean Comfort (801689) (Tillbehör)

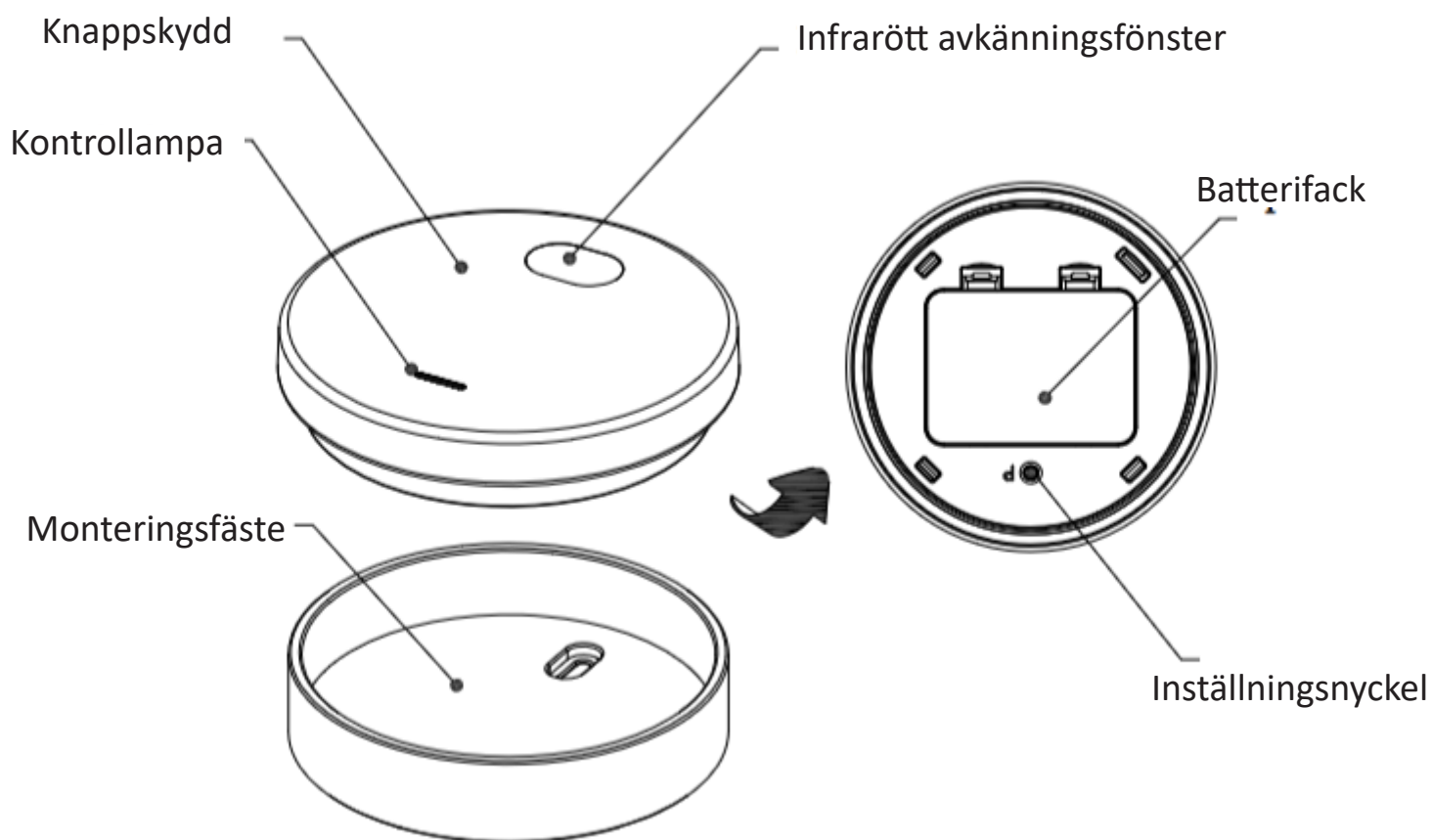


Bilderna är endast för referens.

Bakre tvätt/Främre damtvätt

När du sitter-

Tryck på knappen "Tvätta" på fjärrkontrollen för att starta tvättprogrammet. Det stoppas automatiskt efter 3 minuter. Du kan stoppa tvätten manuellt innan dess genom att trycka på knappen "Stopp".

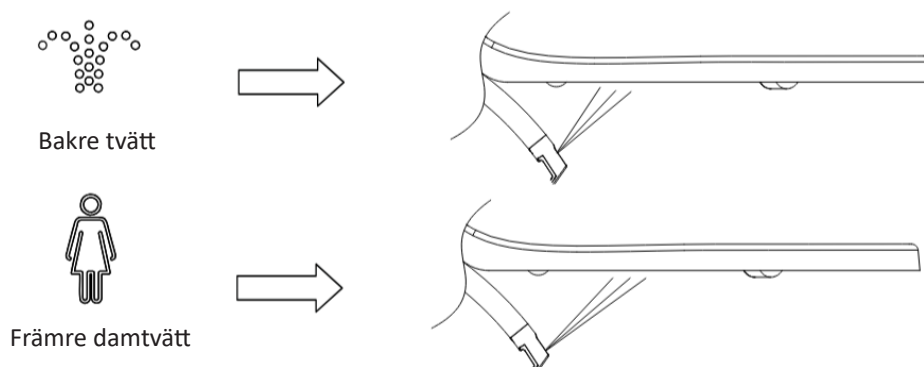


Obs: Medan bak- eller damtvätt körs, kommer systemet att förlängas till och tvätta i en fast position i cirka 10 sekunder. Därefter går det igenom en rörlig tvättfas i cirka 18 sekunder innan det återgår till sin fasta position för resten av programmet.

Torkning

När du sitter-


Tryck på knappen "Torkning" på fjärrkontrollen för att starta programmet. Det körs i 3 minuter.

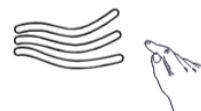

Alternativt

Medan du sitter, med systemet i standby-läge-

Tryck på kontrollvredet på sidan av systemet. Programmet körs i 3 minuter.

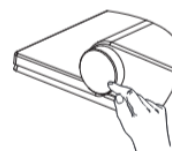

Massagetvätt

Under bak- eller främre damtvättprogrammet -

Tryck på massageknappen på fjärrkontrollen för att bläddra igenom alternativen och välja önskat sprayläge:



Oscillerande: När en indikatorlampa lyser



Pulserande: När två indikatorlampor lyser



Oscillerande + Pulserande: när tre indikatorlampor lyser




Stoppa driften

Under baktvätt, främre damtvätt eller torkprogram -

Tryck på "Stopp"-knappen på fjärrkontrollen för att stoppa det aktuella programmet

Alternativt

Tryck på sidoknappen för att stoppa det aktuella programmet

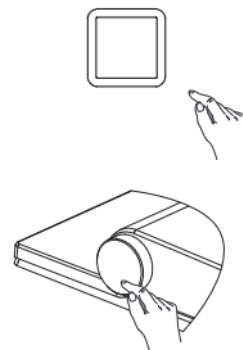

Justera vattenflödet


Under bak- eller främre damtvätt tvättprogrammet -

Tryck på knappen "Justera vattenflödet" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna "Minska" eller "Öka" för att justera flödes hastigheten.

Alternativt

Justera flödet genom att vrida på sidoratten.

Flödes hastigheten ökar när ratten vrids medurs och minskar när den vrids moturs.

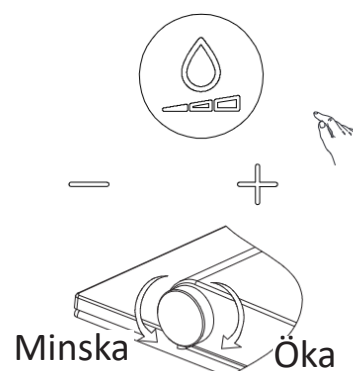


Justering av luftflödet

Under torkprogrammet -

Tryck på knappen "Justera luftflödet" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna "Minska" eller "Öka" för att justera flödes hastigheten.

Alternativt

Justera flödet genom att vrida på sidoratten. Flödes hastigheten ökar när ratten vrids medurs och minskar när den vrids moturs.

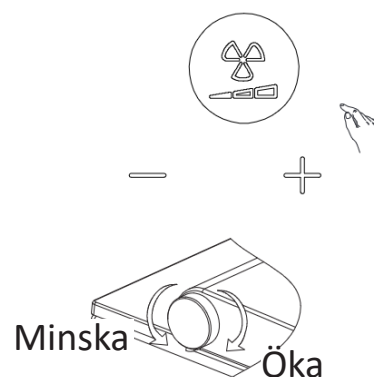

Justera munstyckets position

Under bak- eller främre damtvättsprogrammen -

Tryck på knappen "Justera position" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna "Minska" eller "Öka" för att placera munstycket på rätt sätt.

Standardinställningen för munstycket är den 5:e positionen




Vattentemperaturjustering

Tryck på knappen "Justera vattentemperaturen" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen "Öka" eller "Minska" för att justera vattentemperaturen.

Alternativt

Under bak- eller främre damtvättsprogrammen -

Håll sidoknappen intryckt och vrid den. Vattentemperaturen ökar när knappen vrids medurs och minskar när den vrids moturs.

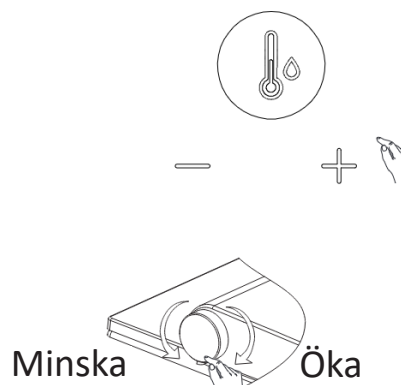


Lufttemperaturjustering

Tryck på knappen "Justera lufttemperaturen" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen "Öka" eller "Minska" för att justera lufttemperaturen.

Alternativt


Under torkprogrammet -

Håll sidoratten intryckt och vrid den. Lufttemperaturen ökar när ratten vrids medurs och minskar när den vrids moturs.

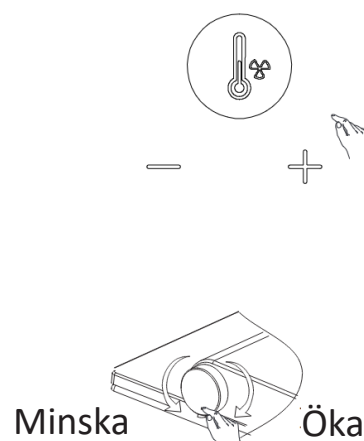

Justering av sätestemperatur

Tryck på knappen "Justera sätestemperatur" på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna "Öka" eller "Minska" för att justera temperaturen.

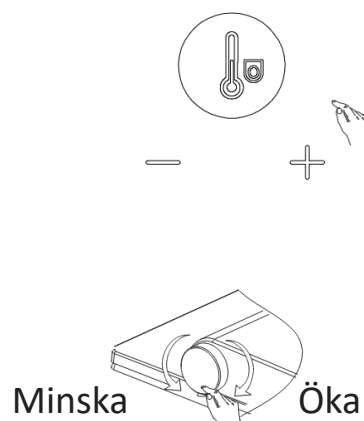

Slå på eller av ljudet

Ljudet är på som standard och det kommer att höras ett pip när spol- torksitsen tar emot ett kommando eller en signal-

Öppna locket och sitsen

Tryck och håll in vredet och vrid det sedan. Ljudet slås på om det vrids medurs och stängs av om det vrids moturs.

Ljusinställningar

Nattlampan är som standard i "alltid på"-läge-

Tryck upprepade gånger på knappen "Nattlampa" på fjärrkontrollen för att växla mellan de olika inställningarna:



Stängt läge - en indikatorlampa lyser



Alltid på-läge - två indikatorlampor lyser




Smart läge - tre indikatorlampor lyser



Alternativt

Öppna locket och sitsen och vrid sedan vredet moturs medan du inte sitter på systemet. Detta kommer att växla mellan nattlampans olika lägen.

Obs: I "Smart"-läget tänds nattlampan automatiskt i mörka miljöer och släcks i ljusa miljöer.

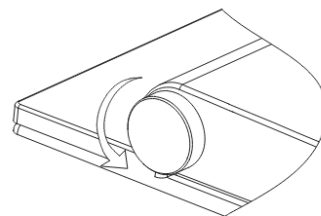

Luktborttagningsinställningar (med D81-18)

Luktborttagningen är som standard inställd på "Smart"-läge – den slås på när användaren sätter sig ner på systemet och stängs av en minut efter att användaren har rest sig upp igen.

Om tvätt- eller torkfunktionerna inte används medan användaren sitter ner, stängs luktborttagaren av automatiskt efter 15 minuter.

Tryck upprepade gånger på knappen "Luktborttagning" på fjärrkontrollen för att växla mellan de olika inställningarna:



Stängningsläge – en indikatorlampa lyser




Smartläge – två indikatorlampor lyser



Alternativt

Med locket öppet och medan du sitter på plats, utan att varken tvätt- eller torkfunktionerna är igång, tryck och håll in vredet och vrid det antingen medurs eller moturs för att slå på eller av luktborttagningen.

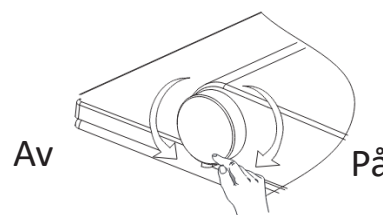

Inställningar för indikatorlampan

Indikatorlampan är alltid tänd som standard -

Med locket öppet och medan du sitter, utan att varken tvätt- eller torkfunktionerna är igång, tryck och håll in vredet i 6 sekunder - detta släcker indikatorlampan.

Den kan slås på igen genom att upprepa denna process.


Autofunktionsinställningar

1. Tryck på knappen 'Autofunktion 1' på fjärrkontrollen för att aktivera följande program:

Baktvätt (2 minuter) -> Främre damtvätt (1 minut) -> Torkning (4 minuter)

Alternativt

Denna funktion kan manövreras genom att vrida på vredet. Vrid det medurs för att starta autofunktion 1.


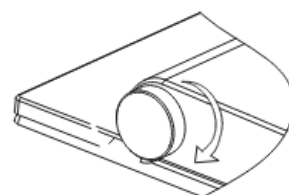


2. Tryck på knappen 'Autofunktion 2' på fjärrkontrollen för att aktivera följande program:

Baktvätt (2 minuter) -> Torkning (4 minuter)

Alternativt

Denna funktion kan manövreras genom att vrida på vredet. Vrid det moturs för att starta autofunktion 2.

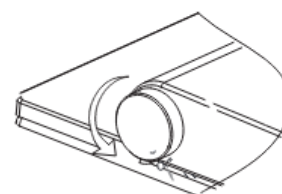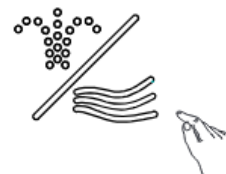

Obs: Om du trycker på knappen under autofunktion 1 eller 2 hoppar programmet vidare till nästa steg i funktionen.


För att avsluta autofunktion 1 eller 2 med hjälp av knappen måste den hållas intryckt och hålls intryckt i 2 sekunder för att avbryta programmet.

Power standby-inställningar

Medan man inte sitter på wc-stolen och med locket stängt -

Tryck och håll in vredet i mer än 6 sekunder för att sätta spol- och tork i standby-läge.

Tryck och håll in vredet igen i ytterligare 6 sekunder för att starta om den.

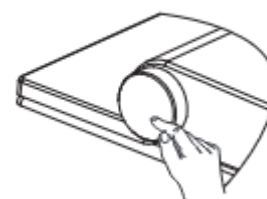


> 6s


One-Touch Kontroll för Comfort Clean Instruktioner

Fjärrkontrollen (801689) har följande funktioner:

- **Nyckelfunktion:**
När du sitter, tryck eller trampa kort på knappen/locket på fjärrkontrollen för att starta autofunktion 1

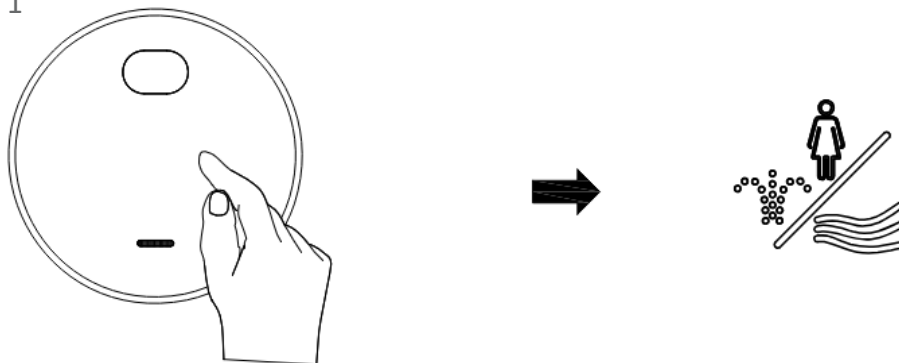

- **Vågfunktion:**
Täck kort över det infraröda fönstret medan du sitter för att starta autofunktion 2.

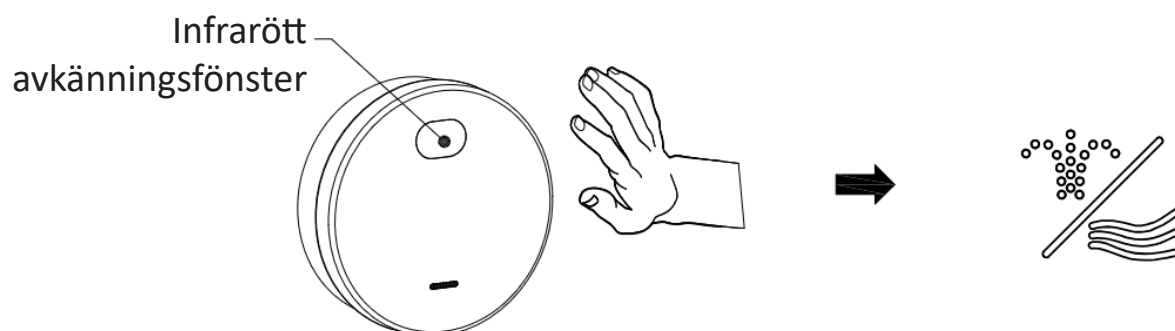

Skötsel, service och rengöring

Allmänna rekommendationer för skötsel och rengöring

Clean Comfort är ett hjälpmedel för personlig hygien avsett för upprepad användning i hemmiljöer och vårdmiljöer.

Återbehandling består av manuell rengöring med eventuell desinfektion på låg nivå.

Följande metoder är inte tillåtna:

- Sterilisering
- Högnivådesinfektion
- Nedsänkning av enheten eller dess komponenter
- Högtryckstvätt eller ångrengöring

Underhållsintervall	Underhållsåtgärd
Dagligen	Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att undvika kalkfläckar
Veckovis	Rengör alla ytor på bidén. Kontrollera och rengör även spolmunstycket manuellt vid behov (sida 20)
Månadsvis	Rengör de keramiska delarna av WC med ett rengöringsmedel med låg syrahalt
Var 6:e månad	Kontrollera och byt filter vid behov
Årligen	Avkalka enheten (sida 21)

Kompatibla rengörings- och desinfektionsmedel

Clean Comfort har bedömts avseende material- och funktionskompatibilitet med följande rengörings- och desinfektionsmedel när de används uteslutande i enlighet med denna bruksanvisning:


- TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e
- Terralin Protect
- Rely+ON PeraSafe

Kompatibilitet gäller endast när dessa produkter används enligt tillverkarens anvisningar och denna bruksanvisning, inklusive applicering med mjuka, icke-slipande dukar eller svampar, följt av sköljning med rent kallt vatten och torkning. Användning av andra kemiska medel eller rengöringsprodukter rekommenderas inte, såvida deras kompatibilitet inte uttryckligen har bekräftats av tillverkaren.

Metoder för rengöring och (vid behov) desinfektion:

Rengöringsmedel	Typologi
TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e*	Restroom / bathroom cleaner
Terralin Protect	Disinfectant and general biocidal product
Rely+ON PeraSafe*	Disinfectant

** När hela APPH (hjälpmedel för personlig hygien) är utrustad antingen med armstöd med beröringspanel eller cistern med beröringspanel för styrning av höjdjustering och hygienfunktioner, ska de rengörings- och desinfektionsmetoder som är markerade med en asterisk uteslutande användas, och endast appliceras med en mjuk, icke-slipande engångs mikrofiberduk eller en mjuk engångsduk baserad på cellulosa. Sköljning ska endast utföras genom att spraya rent vatten på en icke-slipande engångs mikrofiberduk eller en mjuk engångsduk baserad på cellulosa, och genom att torka av området där rengörings- och desinfektionsmedlet tidigare har applicerats. Direkt sprayning av dessa kemikalier på beröringspaneler kan påverka funktionaliteten och den operativa livslängden hos APPH.*

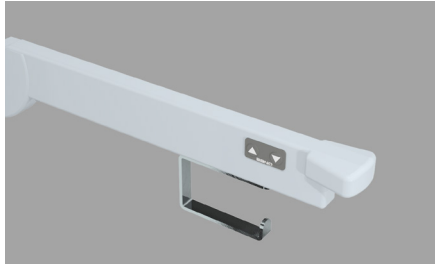

armstöd med beröringspanel



cistern med beröringspanel

Medel som är lämpliga för applicering och borttagning av kemikalier:

- Mjuk, icke-slipande engångs mikrofiberduk
- Mjuk engångsduk baserad på cellulosa
- Icke-slipande svamp med öppna celler (t.ex. WipeOut-svamp)
- Handhållen spray/nebulisator

IP-ansvarsfraskrivelse

Referenser till tredjepartsprodukter

Referenser till specifika rengörings- eller desinfektionsmedel, inklusive deras varumärken och tillverkare, ges endast i informationssyfte.

Alla varumärken, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör respektive ägare. Förekomsten av sådana referenser utgör varken en certifiering eller ett juridiskt godkännande för användning av dessa produkter, och innebär inte heller något kommersiellt förhållande.


Tillverkaren av hjälpmedlet tar inget ansvar eller någon skyldighet förhållande till regulatorisk status, sammansättning eller tillgänglighet för rengörings- eller desinfektionsprodukter från tredje part.

Godkänd rengöringsmetod

För att säkerställa säker användning, funktionell integritet och lång livslängd för detta hjälpmedel ska följande metod tillämpas utan avvikelser:

1. Applicera rengörings- eller desinfektionsmedlet endast på:
 - En mjuk, icke-slipande engångs mikrofiberduk
 - En mjuk engångsduk baserad på cellulosa
 - En icke-slipande svamp med öppna celler (t.ex. WipeOut-svamp)
2. Rengör enhetens ytor genom att torka från de minst förorenade ytorna till de mest förorenade ytorna.
3. Spraya inte rengörings- eller desinfektionsmedel direkt på enheten.
4. Efter avtorkning ska alla behandlade ytor sköljas med rent, kallt vatten för att avlägsna eventuella kemiska rester. (Det kan vara praktiskt att använda en handhållen lågtrycks vatten-spray/nebulisator.)
5. Torka alla ytor med en mjuk engångsduk vald bland de som anges i punkt 1.

Denna procedur gäller för alla användartillgängliga ytor, inklusive sits, stödarmar, ryggstöd, kontrollgränssnitt och yttre kapsling.

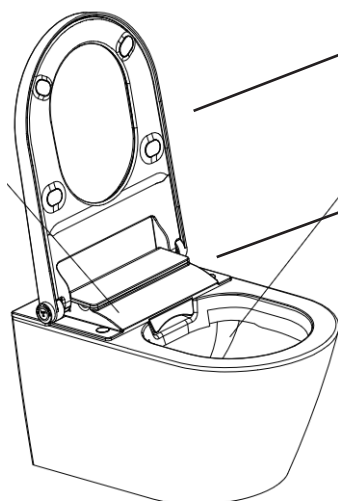

Illustrerat

För sitshandtag

- Fuktig mjuk duk eller svamp (enligt föregående avsnitt)

För E-bidet

- Enligt föregående avsnitt

För WC-skål i keramik

- Mjuk toalettbörste av silikon

Använd rengöringsmedel som anges i avsnittet ovan



Slipande verktyg, direkt sprayning, nedsänkning eller applicering av kemikalier med andra metoder än de som beskrivs ovan är inte tillåtna.

Otillåten rengöringsmetod

För att förhindra skador, funktionsnedsättning eller minskad livslängd är följande strikt förbjudet:

- Slipande dukar, borstar eller svampar
 - Blötläggning, nedsänkning eller att vätska får tränga in i mekanismen
 - Direkt sprayning eller skumbildning av kemikalier på ytor
 - Användning av icke godkända sura, alkaliska eller oxiderande medel
 - Överdriven mekanisk kraft vid rengöring
- Avvikelse från kemikalietillverkarens instruktioner eller från denna bruksanvisning

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på ytor, rörliga delar eller bärande konstruktioner.

Självrengöring - tank






Om systemet inte används på mer än 72 timmar startar ett självrengöringsprogram som varar i cirka 3 minuter. Alla knappar och funktioner är inaktiverade under detta program. Systemet återgår automatiskt till normal drift när självrengöringsprogrammet är slutfört.

Rengöring av munstycke

Munstycket rengörs automatiskt före och efter tvätt

Manuell rengöring utförs enligt följande:

Öppna lock och sits, och vänd därefter ratten medurs. Munstycket körs då ut med rengöringsvatten. Munstycket dras in igen efter 5 minuter, eller om "Stop"-knappen trycks.

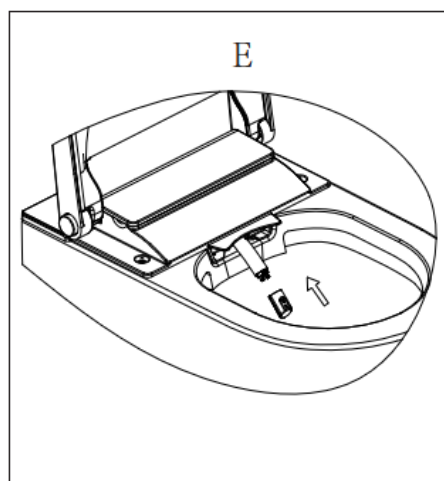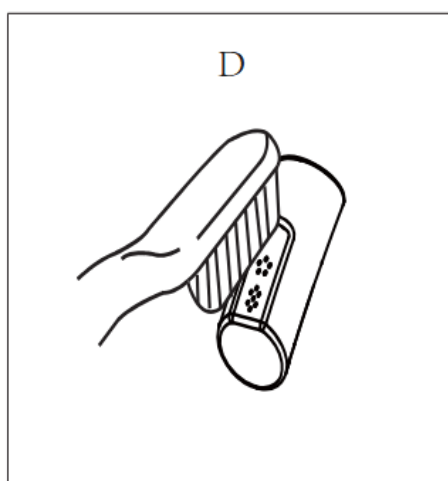
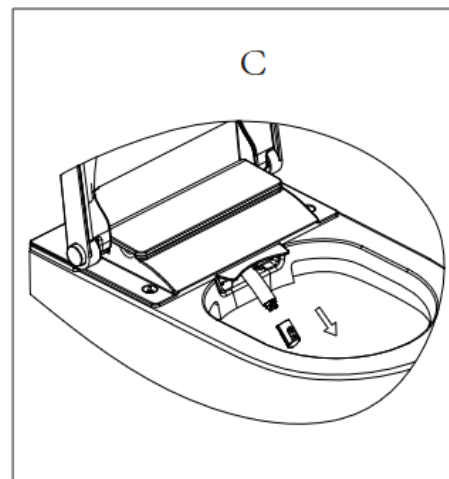
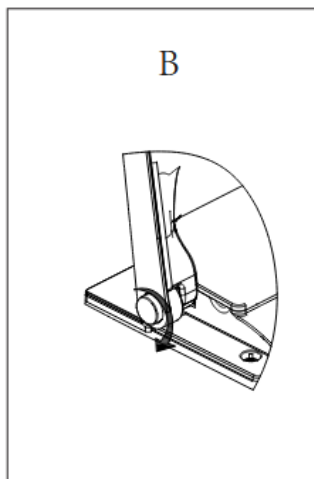
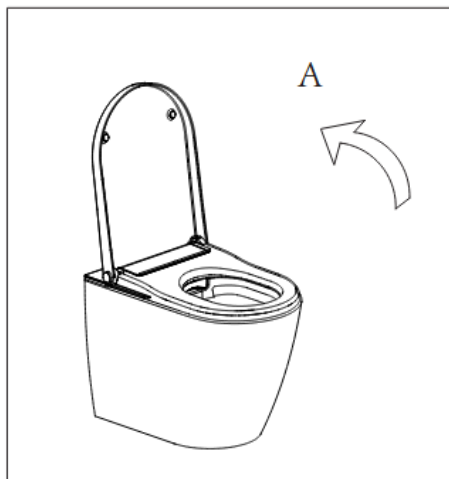


Byte av vattenfilter

Filtret har en livslängd på 6 månader, beroende på vattenkvalitet
Filtret ska bytas om genomströmningen av tvättvattnet har minskat

900986

Vattenfilter - Clean Comfort

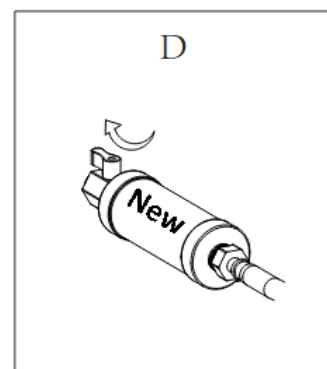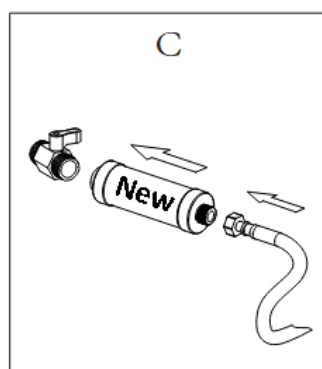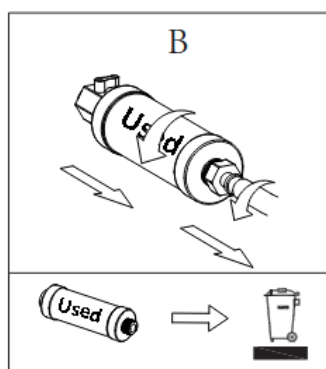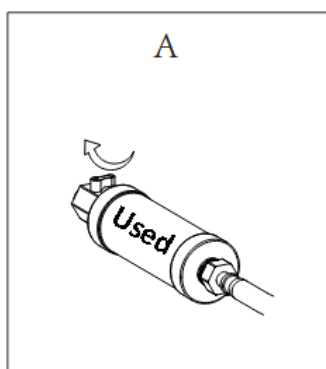

Avkalkning av enheten

Systemet måste avkalkas minst en gång per år, eller oftare beroende på antalet tvättcykler och kvaliteten på vattenförsörjningen.

Under avkalkningsprocessen kan toaletten fortfarande användas, men tvättfunktionerna är inte tillgängliga.

Avkalkningsprocessen kan ta upp till 30 minuter. Under denna tid blinkar en grön LED-lampa och enheten avger en hörbar signal. När den gröna LED-lampan slutar blinka och släcks är processen slutförd och tvättfunktionen kan användas igen.


Använd avkalkningsmedel som inte skummar för mycket.



För att undvika skador på enheten eller personskador får avkalkningsmedel som är för starka eller aggressiva inte användas.

1

Öppna lock och sits

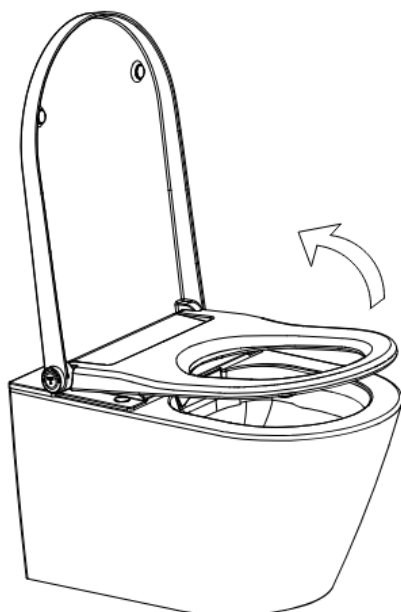

2


Öppna avkalkningslocket



När avkalkningslocket öppnas startar tömning av vatten från tanken, vilket skapar utrymme för avkalkningsmedlet. Tillsätt avkalkningsmedlet efter att du hör ett "pip" från maskinen.


3

Öppna gummilocket

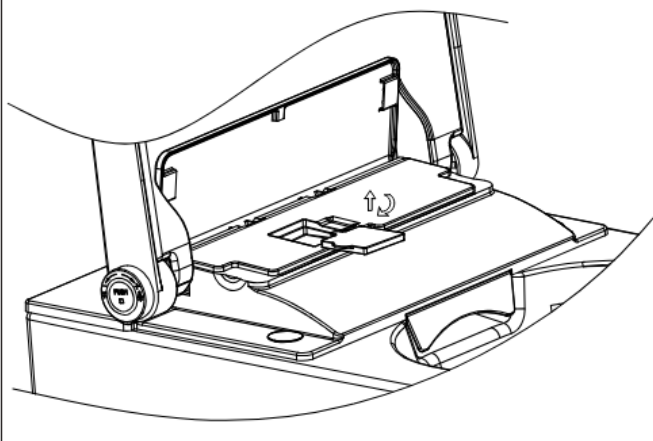


4

Tillsätt cirka 150 ml avkalkningsmedel

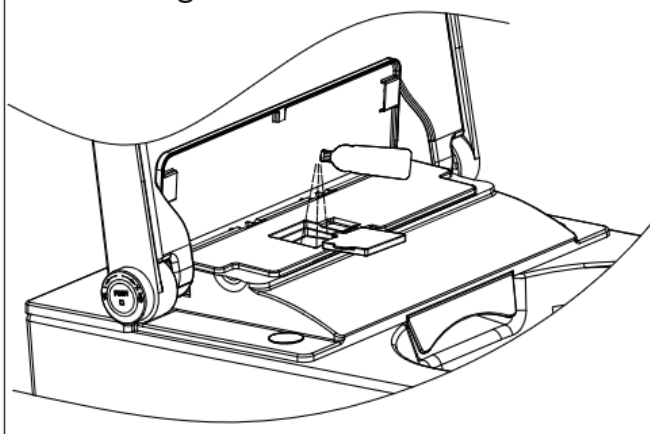

5


Stäng gummilocket och
avkalkningslocket

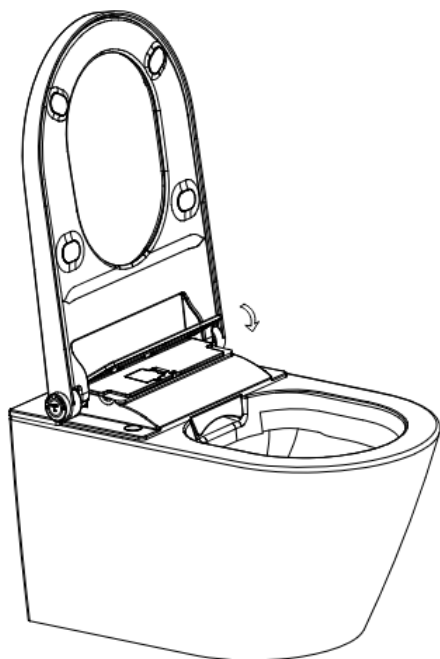



6

Avkalkningsprocessen startar när locket stängs. Under denna process kan toaletten användas, men tvättprogrammen är inte tillgängliga. Processen tar cirka 30 minuter. Under denna tid blinkar LED-lampan på ratten. När LED-lampan slutar blinka tänds andningsljuset igen (om det inte var avstängt), och du hör ett långt "pip". Detta indikerar att tvättprogrammen åter är klara för användning.

Byte av luktfilter

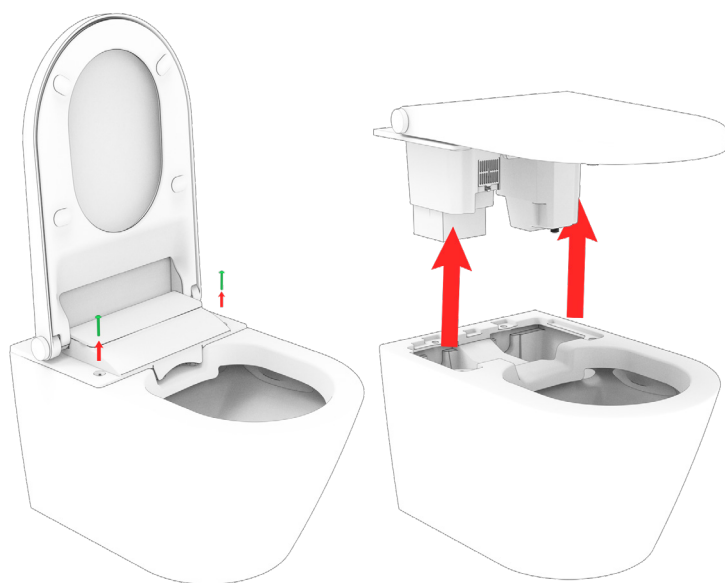

Luktfiltret har en rekommenderad livslängd på cirka 6 månader

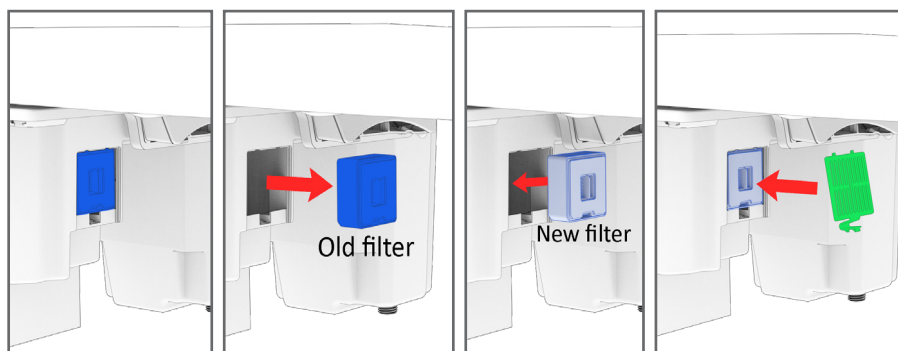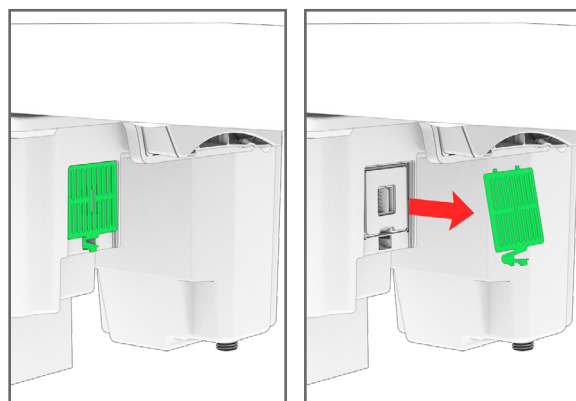

900989



Luktfilter – Clean Comfort

Du kan märka minskad effekt av luktfunktionen när filtret närmar sig slutet av sin livslängd

Tömning av vattentanken



1. Vatten- och strömförsörjningen måste stängas av eller kopplas bort innan bidén demonteras.
2. Luta eller vänd inte enheten förrän vattentanken är tömd.

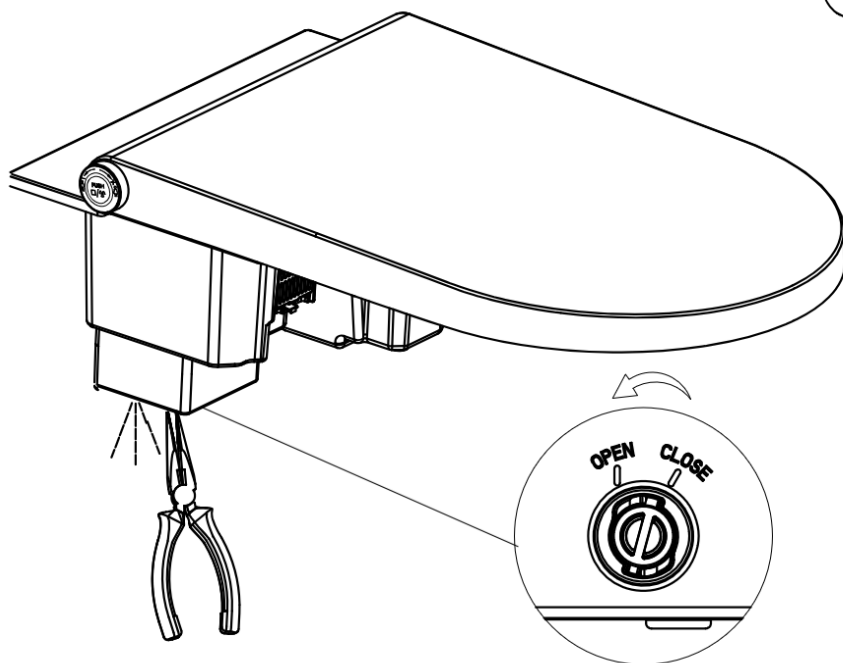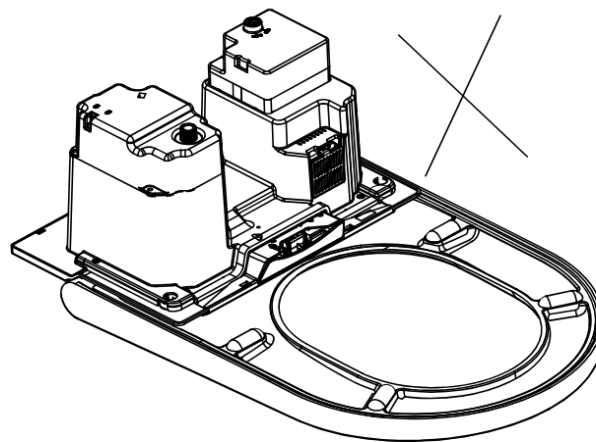


1. Använd en tång för att vrida pluggen till läget "Open" och dra ut den. Vatten börjar då rinna ut ur tanken.
2. När vattnet har slutat rinna, sätt tillbaka pluggen och vrid den till läget "Closed".

Procedur för parkoppling av fjärrkontroll


Om flera elektroniska bidéer installeras i samma område och du vill att varje fjärrkontroll ska styra en specifik elektronisk bidé, slutför installationen genom att följa dessa steg:

1. Öppna både lock och sits, men sätt dig inte på bidén.
2. På aktuell fjärrkontroll: tryck och håll ned knapparna "Stop" och "Water Temperature" samtidigt tills alla 5 LED-lampor lyser, släpp därefter knapparna.
3. Tryck "-" och "+" för att välja olika koder för varje elektronisk bidé.
4. På bidén: tryck og slipp knotten
5. På fjärrkontrollen: tryck och släpp "Stop"-knappen. Den elektroniska bidén avger då ett långt "pip". Detta indikerar att installationen är slutförd.

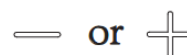

Alternativt

1. Tryck och håll ned knappen "Female Wash" på fjärrkontrollen i cirka 5 sekunder. Indikatorlamporna tänds därefter i tur och ordning. Efter ett kort "pip" börjar indikatorerna blinka.
2. Tryck på sidoknappen på bidén. Indikatorerna på fjärrkontrollen slutar blinka och lyser kontinuerligt i 2 sekunder. När du hör ett långt "pip" är parkopplingsprocessen slutförd.

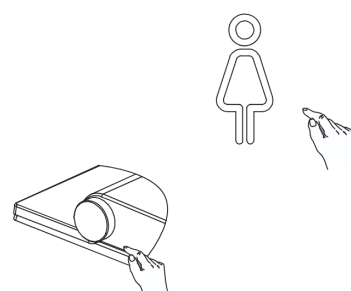


Byte av batterier – fjärrkontroll

- Fjärrkontrollen kräver två batterier (3V CR2032)
- När indikatorlamporna blinkar kontinuerligt indikerar detta att batterierna snart bör bytas



1. Försök inte att ladda icke-uppladdningsbara batterier
2. Uppladdningsbara batterier ska tas ur fjärrkontrollen innan de laddas
3. Blanda inte nya och använda batterier i fjärrkontrollen
4. Batteriene skal settes inn med korrekt orientering og polaritet
5. Utbrukte batterier skal tas ut og kastes på korrekt måte
6. Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, skal batteriene tas ut før lagring
7. Ikke kortslutt polene i fjernkontrollen

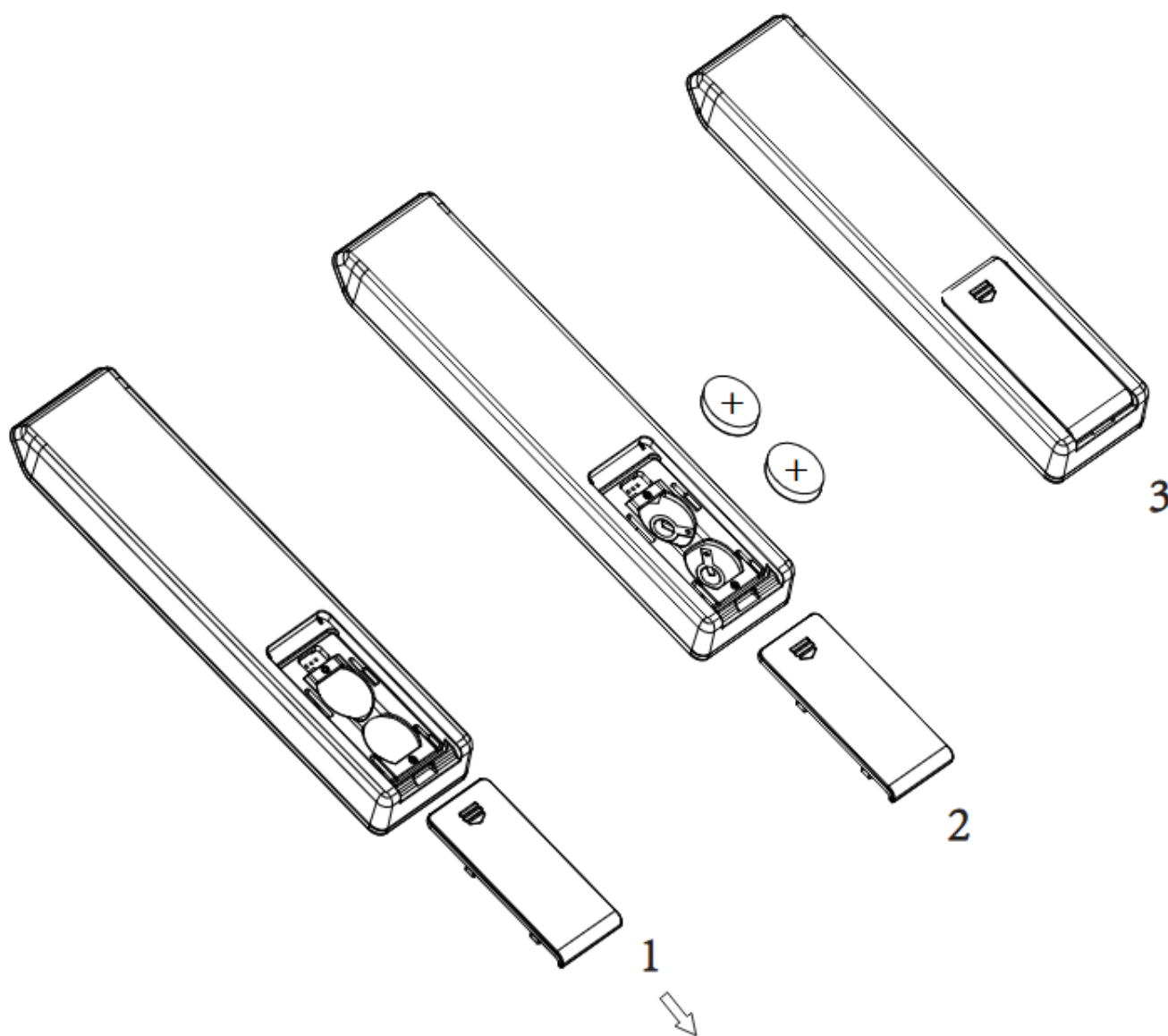






Återställ fabriksinställningar för fjärrkontrollen

Efter att batterierna har tagits ur och satts i igen tänds indikatorlamporna. Tryck och håll in "Stop"-knappen på fjärrkontrollen. Detta gör att indikatorlamporna tänds en efter en. Släpp därefter knappen – processen är slutförd.

STARTUP-PROCEDUR FÖR CLEAN COMFORT


CLEAN COMFORT MED VANLIG CISTERN

- a. Slå på vattnet.
- b. Slå på huvudströmbrytaren (eller motsvarande).
- c. Sätt i batterier i Clean Comfort-fjärrkontrollen (801686). 2× CR2032.
- d. För att para fjärrkontrollen med bidén, följ instruktionerna och ge varje toalett en unik kod om flera enheter finns i närheten:
 - i. Öppna lock och sits.
 - ii. Tryck samtidigt på knapparna för vattentemperatur och stopp i 5 sekunder.
 - iii. Använd + och – för att välja unik kod för denna toalett. Den aktuella koden visas på fjärrkontrollens LED-lampor.
 - iv. Tryck in det roterande stoppreglaget på sidan av sitsen.
 - v. Tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen.
 - vi. Testa ihopkopplingen genom att trycka flera gånger på nattljus-funktionen och kontrollera att ljuset i skålen växlar mellan "Av, På, Automatisk".
 - vii. Det rekommenderas att du skriver ner koden i manualen för framtida referens.
- e. Montera sprutskyddet om du har ett.
- f. Placera något (t.ex. en plastpåse fylld med vatten) på sits-sensorn för att simulera att någon sitter.
- g. Testa följande funktioner med fjärrkontrollen: Autofunktion 1 och 2.
 - i. Aktivera funktionen på fjärrkontrollen.
 - ii. Titta på vattenstrålen, känn temperaturen, observera munstyckets och lockets rörelser och lyssna efter avvikelser.
 - iii. Hoppa till nästa program genom att trycka på samma knapp igen – upprepa även för damtvätt om du kommer från autofunktion 1.
 - iv. Känn temperaturen på torkluften och lyssna på fläkten.
 - v. Torka bort eventuellt spillt vatten och bekräfta att toaletten är redo för leverans:
 - Skruvlock monterat
 - Alla kablar och slangar sitter ordentligt
 - Inga felkoder på den gröna indikatorlampan på sidan av skålen.

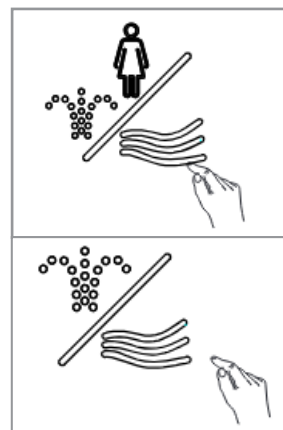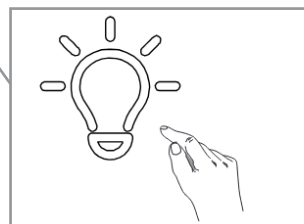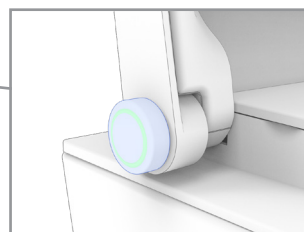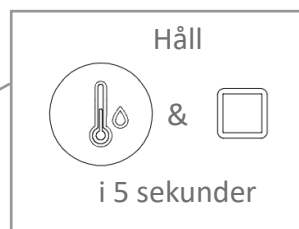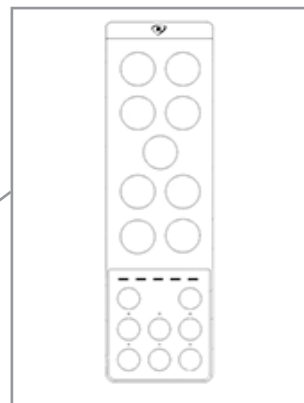

CLEAN COMFORT PÅ BANO HÖJDJUSTERBAR CISTERN MED INTUITIV FJÄRRKONTROLLFJERNKONTROLL

- a. Slutför installationen enligt instruktionerna under CLEAN COMFORT MED VANLIG CISTERN.
- b. Testa höjdjusteringen upp och ner på cisternen för att kontrollera att den har ström och att den rör sig smidigt.
- c. Para den intuitiva fjärrkontrollen (4-knappars) med cisternen:
 - i. Stå 1–2 meter från cisternen med den intuitiva fjärrkontrollen.
 - ii. Placera den magnetiska nyckeln (eller en lätt magnet) på dubbelrings-ikonen längst ned på fjärrkontrollen.
 - iii. Håll ned PIL-NED-knappen i 4 sekunder. Lampan till vänster om magneten börjar blinka långsamt och cisternen börjar pipa i samma takt.
 - iv. Släpp knappen.
 - v. Flytta fjärrkontrollen närmare cisternen. Blinkningen ska då gå över till ett snabbare tempo.
 - vi. Bekräfta ihopparningen genom att trycka på PIL-NED på fjärrkontrollen. Cisternen ger en dubbel pip-signal om allt är korrekt.
 - vii. Testa upp- och ner-funktionerna på fjärrkontrollen för att säkerställa att rätt cistern är ihopparad.
- d. Testa autofunktionerna 1 och 2 (som i steget under CLEAN COMFORT MED VANLIG CISTERN, punkt g) med hjälp av autofunktionsknapparna på den intuitiva fjärrkontrollen.
- e. Testa autofunktion 2 på knappen på cisternlocket och bekräfta att endast bakre tvätt och torkning ingår i programmet.

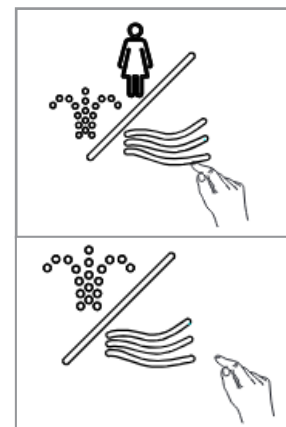

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tvättprogrammet fungerar inte	Strömförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att strömmen är korrekt ansluten och påslagen
	Vattenförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att vattnet är korrekt anslutet och påslaget
	Filtret kan vara igensatt	Byt filtret – det har en livslängd på cirka 6 månader
	Bidén är inte i sittläge	Sätt dig på bidén och justera sittställningen
	Toalettlocket är stängt	Öppna toalettlocket och sätt dig på sitsen
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén utför självrengöring i cirka 3 minuter – tvätt är inte tillgänglig under denna tid
Munstycket dras plötsligt in	Tvättcykeln avslutas automatiskt efter 3 minuter	Detta är normalt – du kan trycka på ”wash”-knappen igen för att starta programmet på nytt
	Problem med vattenförsörjningen	Kontrollera anslutning och flöde vid vatteninloppet
	Sensorn registrerar att ingen sitter	Justera sittställningen och försök igen
	Toalettlocket stängs	Toalettlocket stängs
Låg vattenmängd	Flödet kan vara inställt för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller ratten
	Vattentrycket är för lågt	Säkerställ att vattentrycket är $\geq 0,07$ MPa
	Filtret kan vara igensatt	Byt filtret – det har en livslängd på cirka 6 månader
	Munstycket kan vara blockerat	Rengör eller byt munstycket
Låg vattentemperatur	Vattentemperaturen kan vara inställd för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller ratten
	Temperaturen på vattenförsörjningen kan vara för låg	Höj vattentemperaturen och/eller minska vattenmängden
Munstycket körs ut mycket långsamt	Munstycket kan vara i självrengöringsläge	Detta är en del av normal drift
Vatten rinner ut, men munstycket körs inte ut	Munstycket kan vara i självrengöringsläge	Detta är en del av normal drift
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén kommer att utföra självrengöring i cirka 3 minuter – tvätt är inte tillgänglig under denna period
Torkfunktionen fungerar inte	Strömförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att strömmen är korrekt ansluten och påslagen
	Bidéet er ikke i sittemodus	Sett deg på bidéen og juster sittestillingen
	Toalettlocket är stängt	Öppna toalettlocket och sätt dig på sitsen
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén kommer att utföra självrengöring i cirka 3 minuter – torkfunktionen är inte tillgänglig under denna period
Låg lufttemperatur	Lufttemperaturen kan vara inställd för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller ratten
	Luftvärmaren fungerar inte korrekt	Kontakta Bano
Night light is always off	The environment is too bright	In smart mode, the light will only illuminate in dark environments
	The night light setting may be off	This can be turned on/off using the remote control or the knob

Nattljuset är alltid på	Omgivningen är för mörk	I smart-läge släcks ljuset endast i mörka miljöer
	Något täcker knappen/sensorn	Ta bort eventuella hinder från detta område
	Ljuset kan vara inställt på "Always on"	Detta kan slås på/av med fjärrkontrollen eller ratten
Munstycket dras automatiskt in under manuell rengöring	Munstycket dras in efter 5 minuter	Detta är normalt – processen kan startas om om du inte är färdig med rengöringen
	«Stop»-knappen har tryckts in	Rengöringsprocessen stoppas och munstycket dras in om denna knapp trycks
	Toalettlocket stängs	Sänk inte toalettlocket under rengöring
Fjärrkontrollen fungerar inte	Det kan vara ett problem med batteriernas installation	Kontrollera att båda batterierna är korrekt installerade
	Batterikapaciteten kan vara låg	Byt batterierna
	Fjärrkontrollen kan vara ansluten till fel bidé	Kör en-till-en-inställningen för att synkronisera rätt fjärrkontroll och bidé
Det hörs pipljud medan bidén används	Pipljud hörs när man sätter sig ner, reser sig upp och trycker på knappar	Detta är normalt och kan slås på/av via fjärrkontrollen eller ratten
Bidén fungerar inte korrekt	Det föreligger ett mekaniskt eller elektriskt fel	Stäng av strömmen till enheten i en minut, slå sedan på igen och försök på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta Bano
Ljuset runt ratten blinkar dubbelt och piper kontinuerligt	Temperaturen på vattenförsörjningen är för hög	Stäng av ström- och vattenförsörjningen, avstå från att använda enheten och kontakta Bano
Ljuset runt ratten blinkar kontinuerligt	Det kan föreligga ett problem med bidén	Kontrollera ström- och vannförsyning, slå av strömmen och start enheten på nytt. Dersom problemet vedvarer, kontakt Bano



Elektriska apparater och batterier får inte slängas som osorterat hushållsavfall. Använd alltid separata och godkända insamlings- och avfallssystem.

Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av enheten och dess komponenter.

Om elektriska apparater och komponenter hanteras felaktigt kan farliga ämnen läcka ut i miljön och orsaka skador.

Vid utbyte av gamla apparater mot nya är återförsäljaren enligt lag skyldig att ta emot de gamla apparaterna kostnadsfritt för korrekt avfallshantering.

Reservedeler

Delnavn	Itemnr.
Toalettsits med lock för Clean comfort	900966
Vattenpump Clean comfort	900985
Vattenfilter Clean comfort	900986
Fjärrkontroll Clean comfort	900986
Vattentankmodul Clean comfort	900988
Luftfilter – Clean Comfort	900989
Munstyckssats Clean comfort	900990
Inloppsventil för Clean comfort	900991
Elektronisk modul – Clean Comfort	900616
Moderkort Clean Comfort	140201
Fläktenhet Clean Comfort	900814

Placering av produktmärkning och identifiering

