

BANO CLEAN 700-SERIEN · BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR

BANO CLEAN 700

BC711/BC712



BC-711

Mindre version. Lämplig för barn och personer med mindre kroppsbyggnad.

BC-712

Större version. Optimal sittkomfort och stabilitet för vuxna.

INNEHÅLL

11 AVSNITT

01	PRODUKTINTRODUKTION	03
	Funktioner, modeller och målgrupp	
02	TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH SÄKERHETSFUNKTIONER	04
	Tekniska data, mått och inbyggda säkerhetsfunktioner	
03	SÄKERHETSANVISNINGAR	05
	Viktiga varningar om ström, vatten och användning	
04	LÅGTEMPERATURBRÄNNSKADOR OCH INFORMATION OM ANVÄNDNING	06
	Försiktighetsåtgärder för känsliga användare och förväntat beteende	
05	FJÄRRKONTROLL & INSTÄLLNINGAR	07
	Knappfunktioner och anpassningsmöjligheter	
06	AUTOMATISK TVÄTTFUNCTION (ONE-TOUCH)	09
	Anpassning och användning av AUTO 1 / AUTO 2	
07	RENGÖRING & UNDERHÅLL	10
	Filter, munstycke, sits, lock och automatisk rengöring av vattenkanal	
08	INSPEKTION & FELSÖKNING	12
	Vanliga fel och åtgärder	
09	MONTERINGSANVISNING	13
	Montering i 12 steg på befintlig toalettstol	
A	BILAGA — TEKNISKA RITNINGAR	17
	Måttritningar för BC-711 och BC-712	

**LÄS HELA MANUALEN FÖRE ANVÄNDNING**

Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. Spara manualen för framtida bruk. Manualen medföljer produkten och ska överlämnas vid ägarbyte.

PRODUKTINTRODUKTION

AVSNITT 01 / 9

Bano Clean 700-serien är en bidésitslösning med integrerade spol- och torkfunktioner. Sitsen är utvecklad för användare som vill ha ett intuitivt och hygieniskt sätt att sköta toalettbesök. Sitsen tvättar och torkar med tempererat vatten och luft efter toalettbesök.

UTFORMAD FÖR ALLA ANVÄNDARE

- Särskilt utformad för ett brett urval av toaletter på den skandinaviska marknaden — både vägghängda och golvstående modeller.
- Levereras med tillbehör som kan göra produkten lättare att använda.
- Tillverkad i hygienisk plast för enkel rengöring och underhåll.

TVÅ MODELLER — ANPASSADE EFTER ANVÄNDARENS BEHOV

MODELL	ANVÄNDNING	MAX. VIKT
BC-711	Mindre version — lämplig för barn och personer med mindre kroppsbyggnad.	125kg
BC-712	Större version — optimal komfort och stabilitet för vuxna.	150 kg

FUNKTIONER

MANUELLA PROGRAM

- Spolning bak
- Spolning fram
- Torkfunktion

AUTOMATISKA PROGRAM

- Förkonfigurerade från fabrik
- Helt anpassningsbara — sparas som **AUTO 1** eller **AUTO 2**
- Automatiskt avkalkningssystem

JUSTERBARA PARAMETRAR

- Vattenmängd och -temperatur
- Munstycksposition och pulsering
- Oscillerande munstycksfunktion
- Torkluftens mängd och temperatur
- Tidsintervall
- Deodorizer — luktutsug

SÄKERHET OCH ANVÄNDBARHET

Bano Clean 700 är IPX5-klassad och kan placeras i duschzon.



UPPVÄRMD SITS

Den uppvärmda sitsen ger komfort och en känsla av trygghet för användare med begränsad sittstabilitet. Temperaturen kan justeras i fyra steg.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH SÄKERHETSFUNKTIONER

AVSNITT 02 / 9

TEKNISKA DATA

MODELLNUMMER	BC-711 · BC-712
STRÖMFÖRSÖRJNING	AC 220 V · 50/60 Hz · Driftström tvätt 15 mA · Kabellängd 1,5 m
VATTENTRYCK	Max. 10 bar · Vattenflöde ca 0,8 l/min
VATTENTEMPERATUR, TVÄTT	4 steg · rumstemp / 35 °C / 37,5 °C / 40 °C
SITSTEMPERATUR	4 steg · rumstemp / 34 °C / 36 °C / 38 °C
TORKLUFT	3 steg · 40–70 °C · Effekt 370–435 W
VIKT	6,4 kg · Max. användarvikt: BC-711 125 kg · BC-712 150 kg
KAPSLINGSKLASS	IPX5
DRICKSVATTENSKYDD	EN 1717 kat. 5 (skydd mot förorening av dricksvatten) · EN 13077 (skydd mot återströmning via luftgap)

PRODUKTETIKETT



Produktetiketten sitter på undersidan av bidésitsen och innehåller:

- **Modellnummer**
- **Spänning/effekt**
- **Vattentryck**
- **Max. användarvikt**
- **Serienummer (SN)**
- **CE och IPX5**
- **Tillverkare**

INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER

1. Termiskt överhettningsskydd för varmvattenmodul
2. Temperatursensor för varmvatten
3. Överhettningsskydd — strömavbrott, varmvatten
4. Överhettningsskydd — strömavbrott, uppvärmd sits
5. Torrkörningsskydd (detektering av vattenbrist)
6. Sitsbelastningssensor — aktiveras endast vid användning



OBSERVERA OM STRÖMFÖRSÖRJNING

Vägguttag och spänning varierar mellan länder. Kontrollera kompatibiliteten före användning. Vägguttaget ska vara jordat.

SÄKERHETSANVISNINGAR

AVSNITT 03 / 9



LÄS DESSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Om föreskrifterna inte följs kan det leda till elektrisk stöt, brand eller skada på produkten. Om strömkabeln är skadad ska den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller en motsvarande kvalificerad person.

STRÖM OCH ELSÄKERHET

- Hantera inte stickkontakten med våta händer — risk för elektrisk stöt.
- Se till att stickkontakten är korrekt ansluten.
- Använd inte skadade strömkablar eller stickkontakter.
- Undvik adapterar och förlängningssladdar.
- Skada inte strömkabeln genom att böja, vika, dra i eller klämma den.
- Elektrisk anslutning ska utföras enligt gällande nationella regler för våtrum och badrum.
- Se till att jordning och jordfelsbrytare (RCD) är korrekt utförda.
- Dra ur stickkontakten vid åska eller vid längre tids uppehåll.

VATTEN OCH PLACERING

- Produkten är klassad IPX5 och skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar.
- Produkten är lämplig för installation i badrum och våtrum vid korrekt installation.
- Produkten får inte sänkas ned i vatten eller rengöras med högtryckstvätt.
- Undvik varaktig direkt exponering för kraftig vattenpåverkan.
- Se till att rum med hög luftfuktighet är tillräckligt ventilerade.
- Undvik att böja eller vrida tillloppsslangen kraftigt.
- Spruta inte vatten direkt på skadade eller öppna elektriska komponenter.

ANVÄNDNING OCH SÄKERHET

- Apparaten kan användas av barn från 3 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga under lämplig tillsyn eller vägledning.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Avbryt användningen vid onormal drift, lukt eller skada och koppla från strömförsörjningen.
- Reparation och service får endast utföras av auktoriserad personal.

LÅGTEMPERATURBRÄNNSKADOR OCH INFORMATION OM ANVÄNDNING

AVSNITT 04 /
9

LÅGTEMPERATURBRÄNNSKADOR

Brännskador förknippas vanligtvis med höga temperaturer (kokande vatten, het olja). **Långvarig kontakt med lägre temperaturer (40–60 °C)** kan också orsaka lågtemperaturbrännskador — beroende på individuell känslighet.

Till skillnad från typiska brännskador, som bara påverkar hudens yta, kan lågtemperaturbrännskador nå djupare lager och ge **röda fläckar eller blåsor**.



VAR SÄRSKILT UPPMÄRKSAM PÅ FÖLJANDE ANVÄNDARE

Sänk alltid temperaturen vid användning för personer i riskgruppen.

- **Barn och äldre** — kan ha nedsatt förmåga att reglera temperaturen.
- **Personer med begränsad rörlighet** — särskilt vid allvarlig sjukdom eller funktionsvariation.
- **Personer med ökad risk att somna** — inklusive personer påverkade av sömnmedel, lugnande medel, alkohol eller extrem trötthet.

Om röda fläckar eller blåsor uppstår, sök läkarhjälp omedelbart.

INFORMATION OM ANVÄNDNING — FÖRVÄNTAT BETEENDE

UNDER DRIFT

- Under rengöring kan vatten rinna ut från sidan av munstycket — det beror på konstruktionen och är inte ett fel.

VATTENTRYCK

- Om vattentrycket faller under **1,3 kgf/cm² (127,5 kPa)** kan vattenflödet bli otillräckligt — även vid maximal inställning. Det kan också inträffa när andra vattenkällor används samtidigt (t.ex. toalettpolning).

INNAN STRÖMMEN ANSLUTS

- Se till att strömförsörjningen stämmer med produktens specifikationer.
- Strömkabeln ska vara enkelledare med en tvärsnittsarea på **minst 2,0 mm**.

OVÄNTAT STRÖMAVBROTT UNDER ANVÄNDNING

- Om strömmen plötsligt bryts kan det inbyggda läckageskyddet ha utlöst. Avbryt användningen, dra ur stickkontakten och anslut den igen för att återuppta driften.

LÄNGRE FRÅNVARO

- Dra ur stickkontakten och töm vattentanken. Stillastående vatten kan med tiden försämrats i kvalitet och orsaka hudirritation.

DEODORISERING OCH STERILISERING

- Effekten av det aktiva kolfiltret och den elektrolytiska steriliseringen kan variera beroende på miljöförhållandena.


UPPVÄRMNING AV VATTEN

- Under uppvärmning kan vatten rinna ut nära munstycket i några sekunder — det är normalt.

FJÄRRKONTROLL & INSTÄLLNINGAR

AVSNITT 05 / 9 · DEL 1 — KNAPPFUNKTIONER

Sätt dig långt bak på sitsen och luta överkroppen lätt framåt. Sitsen aktiveras endast när sitsbelastningssensorn känner av en användare. Nedan följer en genomgång av fjärrkontrollens knappar, i den ordning dessa normalt används.

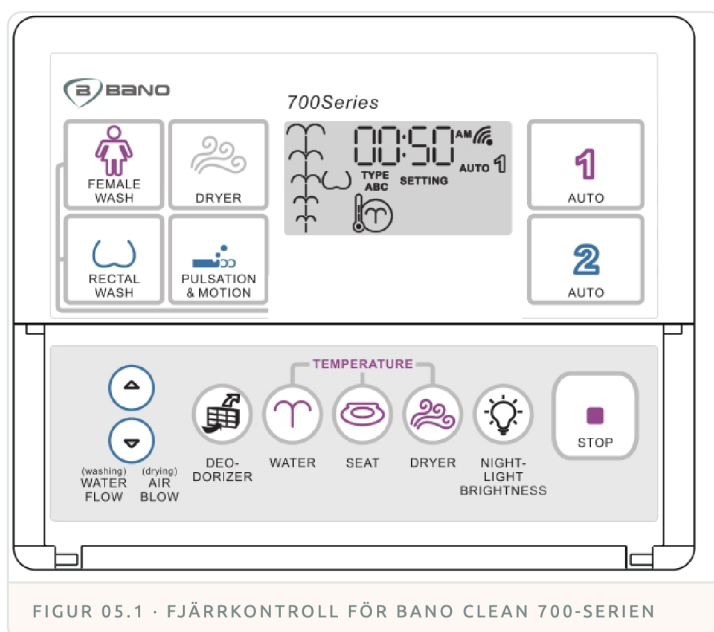

FIGUR 05.1 · FJÄRRKONTROLL FÖR BANO CLEAN 700-SERIEN



TVÄTT BAK

Rekommenderad tvättid **ca 40–50 sek.**


TVÄTT FRAM


Rekommenderad tvättid **ca 10 sek.**


PULSERING / MOTION

Tryck efter att tvätten har startat — växla mellan fast position, oscillerande och pulserande tvätt.



TORKNING

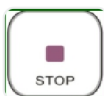Rekommenderad torktid **ca 4–6 min.** Stoppar när du reser dig.


STOPP

Stoppar alla pågående funktioner.



AUTO 1 & 2

Personligt program. Anpassas i avsnitt 06.



DEODORIZER

Luktutsug. Aktiveras automatiskt när man sätter sig på toaletten — slå av och på med ett tryck på knappen.



SITSBELASTNINGSSENSOR

Sitsen aktiveras endast när en användare sitter på den. Om du inte sitter korrekt på sensorn aktiveras inte funktionen när du trycker på tvättknapparna — det är en säkerhetsfunktion och inte ett fel.


ANPASSNINGSMÖJLIGHETER

AVSNITT 05 / 9 · DEL 2 — INSTÄLLNINGAR

När du har lärt känna de grundläggande knapparna (Del 1) kan du finjustera upplevelsen via följande inställningar. Följ stegen från vänster till höger — knapp för knapp. Alla inställningar sparas, och de senaste inställningarna används vid nästa aktivering av bidésitsen


JUSTERA VATTENMÄNGD

Aktivera tvätt — öka eller minska vattentrycket.

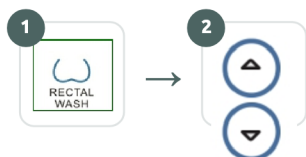

ANPASSA MUNSTYCKETS POSITION

Aktivera tvätt och tryck igen — flytta munstycket framåt eller bakåt

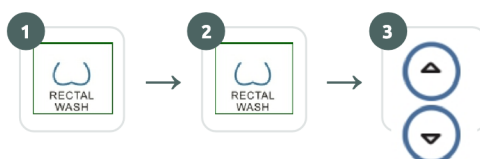

I displayen: Vattenikonen till vänster i displayen visar munstyckets position. Står symbolen längst ned är munstycket i det bakersta läget. Tryck pil upp för att flytta munstycket längre fram/ut.

JUSTERA TEMPERATUR


Tre temperaturer kan justeras i 3 steg: vatten, sits, torkluft.



Tryck upprepade gånger — termometerikonen i displayen visar steget (låg / medel / hög). Syns ikonen inte i displayen är värmen avstängd.


JUSTERA LUFTHASTIGHET

När torkfunktionen är i gång — öka eller minska fläkthastigheten.

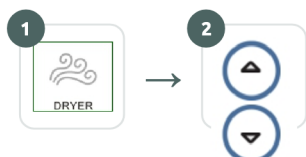

STÄLL IN KLOCKAN I DISPLAYEN

Håll STOPP intryckt tills ikonerna blinkar — justera sedan med pilarna.

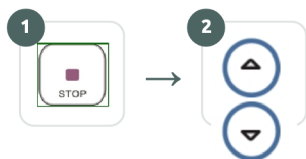

Pil ned = minuter · Pil upp = timmar

STÄLL IN NATTBELYSNING

Tryck upprepade gånger för att justera ljusstyrkan.

OBS: kan inte stängas av helt.



Tryck flera gånger — ljusstyrkan växlar mellan stegen.





FUNGERAR INTE PRODUKTEN? PROVA ALLTID DETTA FÖRST

1. Koppla från strömmen till produkten. Vänta 15 sek. och anslut igen. 2. Byt batterierna i fjärrkontrollen. 3. Testa igen — produkten fungerar bara när man sitter på sitsen.

AUTOMATISK TVÄTTFUNKTION (ONE-TOUCH)

AVSNITT 06 / 9

Med **AUTO 1** och **AUTO 2** kan du spara två personliga tvätt- och torkprogram. Programmen är förkonfigurerade från fabrik och kan anpassas efter behov.

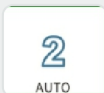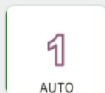

AUTO 1 & AUTO 2

Tryck en gång på en AUTO-knapp för att starta det sparade programmet. Tryck igen för att stoppa.

SÅ ANPASSAR DU AUTO 1 / AUTO 2

1. Håll **AUTO 1** (eller **AUTO 2**) intryckt i 5 sekunder för att öppna justeringsmenyn.
2. Använd knapparna **Spolning fram** eller **Spolning bak** för att justera:
 - Position (5 nivåer)
 - Massage (5 nivåer)
 - Tvättid (6 nivåer)
 - Vattenmängd
3. Använd knappen **Vattentemp** för att justera vattentemperaturen.
4. Använd knappen **Torkluft** för att justera lufttemperatur (3 nivåer) och fläkthastighet (5 nivåer).
5. Justera torktid (6 nivåer).
6. Tryck på **STOPP-knappen** — eller vänta 30 sekunder utan att trycka — för att spara inställningarna och återgå till standby.

MANÖVRERING MED SIDOKNAPPEN (MEDAN DU SITTER)

1. Tryck en gång för att aktivera AUTO 1.
2. Tryck två gånger för att aktivera AUTO 2.
3. Tryck igen för att stoppa driften.



VATTENTEMPERATUR — OBSERVERA

Det kan ta tid innan vattentemperaturen når önskad nivå, eftersom vattnet måste värmas upp till lämplig temperatur.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

AVSNITT 07 / 9

INVÄNDIG AVKALKNING AV BIDÉENHETEN



Bidésitsen har ett **inbyggt automatiskt avkalkningsprogram**. Använd endast **Durgol avkalkningsvätska för Geberit AquaClean** (125 ml). Programmet startar automatiskt när kåpan sätts tillbaka.

VID BEHOV TID ~30 MIN KRÄVER DURGOL 125 ML

1 Ta bort kåpan Håll i båda sidorna och dra kåpan mot dig. Den sitter i clips — det krävs viss kraft.	2 Lyft av kåpan Lyft kåpan uppåt och lägg den åt sidan. Vattentanken med påfyllningsöppning är nu synlig.	3 Ta bort pluggen Ta ut den vita pluggen ur vattentankens öppning. Lägg pluggen åt sidan — den ska användas igen.	4 Fyll på Durgol Häll 125 ml Durgol i vattentankens öppning. Tanken är full när vätska rinner ner i toalettstolen.	5 Sätt tillbaka pluggen Sätt tillbaka pluggen och tryck fast den ordentligt så att den sitter tätt.	6 Sätt tillbaka kåpan Sätt kåpan på plats och tryck fast den. Avkalkningsprogrammet startar automatiskt.
---	---	---	--	---	--

FÖRLOPP

STEG 1 Pumpar vätska ~2 min	STEG 2 Löser upp kalk ~15 min	STEG 3 Sköljer igenom ~15 min	KLART ✓ Klar att använda Totalt ~30 min
---	---	---	---



VIKTIG

När programmet har startat kan det **inte avbrytas**. Tvätt- och torkfunktionerna är otillgängliga under hela förloppet (ca 30 min).



AUTOMATISK PÅMINNELSE

Produkten påminner själv om att avkalkningsprogrammet ska köras **var fjärde månad**. Ljuset inne i toalettstolen börjar pulsera — det är signalen om att det är tid för avkalkning.

MANUELL RENGÖRING AV MUNSTYCKSARMEN



Munstycket kan köras ut manuellt för grundlig rengöring eller byte av munstyckshuvud.

REGLBUNDET TID ~5 MIN KRÄVER TANDBORSTE + HUSHÅLLSÄTTIKA



1 Tryck knappen 2× snabbt

Tryck två gånger snabbt på den grå **multifunktionsknappen** (markerad med röd cirkel) på sidan av bidéenheten. Munstycksarmen körs automatiskt ut.

2 Rengör armen


Använd en gammal tandborste med hushållsättika för att rengöra munstycksarmen grundligt. Munstyckshuvudet kan dras av i samma riktning som munstycket pekar — skölj det under rinnande vatten. Kontrollera att utloppshålen är fria från kalk. Munstyckshuvudet kan med fördel ligga i hushållsättika över natten.

3 Avsluta rengöringen

Armen dras automatiskt in igen **efter 5 min** — eller tryck knappen **1×** för att avsluta manuellt.



RENGÖRING AV FILTERPAKETET

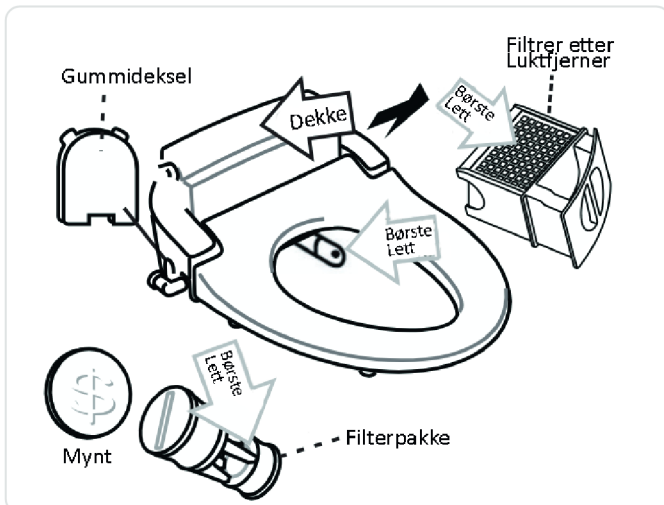

1. Stäng avstängningsventilen — se till att den är helt stängd innan du börjar. Viktigt!
2. **Ta bort gummidökslet** på sidan av huvudenheten.
3. **Ta bort filterpaketet** — använd ett **mynt** eller lämpligt verktyg för att skruva loss filterpaketet.
4. **Rengör filtret** — borsta ytan lätt med en **mjuk borste**.




VIKTIGT OM FILTRET

Se till att filterpaketet är korrekt återmonterat och åtdraget efter rengöringen. Tvätta inte den aktiva kolkomponenten med vatten.


RENGÖRING AV LOCK OCH SITS

TOALETLOCK

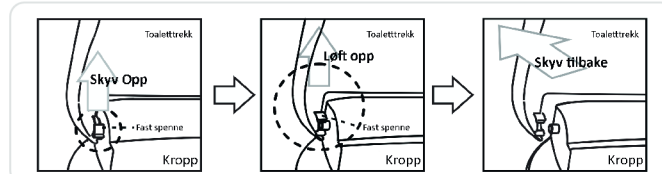

1. Lyft locket och skjut den **vänstra låsmekanismen** uppåt.
2. Lyft **vänster sida** av locket uppåt.
3. Skjut locket bakåt och ta bort det från **höger sida**.

TOALETTSITS

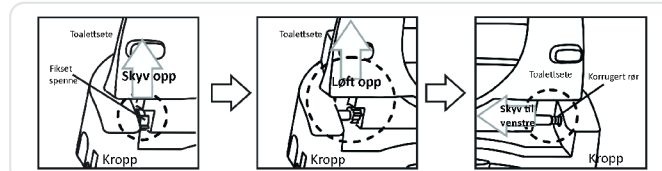

1. Tryck in spärrknappen på den vänstra låsmekanismen.
2. Lyft **vänster sida** av sitsen uppåt.
3. Skjut sitsen något mot **vänster** — observera det **korrugerade röret** på höger sida.



OBSERVERA OM KORRUGERAT RÖR

Sitsens högra sida är ansluten till enheten via ett **fast korrugerat rör**. Dra inte i det — det kan skada ledningarna.

INSPEKTION & FELSÖKNING

AVSNITT 08 / 9

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Lågt vattenflöde / vattentillförseln avbruten / munstycket fungerar inte korrekt	Främmande föremål på munstycksarmen. Filterpaketet är igensatt. Munstyckshuvudet är igensatt.	Rengör munstycksarm och munstyckshuvud grundligt. Rengör filterpaketet.
Tvättfunktionen aktiveras inte när knappen trycks in	Sitssensorn känner inte av användaren korrekt.	Se till att du sitter korrekt över sitssensorn. Starta om bidéenheten genom att koppla från strömmen till produkten och ansluta den igen.
Tvätten stoppar automatiskt under drift	Tvätten har överskridit 5 minuter. Strömindikatorn är avstängd.	Tryck på tvättknappen igen. Försök starta om enheten genom att koppla från strömmen och ansluta den igen.
Sitstemperaturen är för låg	Har inte hunnit värmas upp, eller bidéenheten är avstängd.	Justera sitstemperaturen och vänta ett par minuter. Starta om produkten. Dra ur stickkontakten och sätt in den igen.
Varmvattentemperaturen är för låg	Vattentemperaturen är inställd på en låg nivå.	Öka inställningen för vattentemperatur och kontrollera inställningarna i autoprogrammet.
Varmluftsfunktionen fungerar onormalt	Lufttemperaturen är för hög/låg. Stoppar mitt i driften. Fungerar inte. Låg temperatur registrerad.	Justera med varmluftsknappen. Tryck igen. Se till att du sitter korrekt. Vid omgivningstemperaturer över 35 °C, använd inställningen medel eller hög.
Spolmunstycket kan inte dras tillbaka	Strömmen är bruten. Munstycket är blockerat av främmande föremål.	Anslut strömmen igen.
Spolmunstycket skjuts inte ut	Strömmen är bruten. Sitssensorn känner inte av användaren.	Se till att du sitter korrekt.



OM PROBLEMET INTE LÖSES

Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker. Försök inte demontera, reparera eller modifiera produkten själv. Det kan leda till brand, personskada eller elektrisk stöt. Prova alltid att ansluta strömmen på nytt, byta batterier och genomföra rengöringsproceduren innan du kontaktar support.

UNDERHÅLLSREKOMMENDATION

Låt en servicetekniker inspektera produkten var tredje år för optimal funktion. Kontakta din återförsäljare för förfrågan om serviceavtal.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Håll brandfarliga material (t.ex. cigaretter) borta från produkten.
- Lyft inte produkten i sitsen eller locket — enheten kan lossna och falla.
- Använd inte slipmedel, starka syror eller alkaliska rengöringsmedel.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus — det kan leda till missfärgning eller ojämn uppvärmning.
- Ta inte bort vattenfiltret utan att först stänga avstängningsventilen — risk för vattenstänk.

AVSNITT 09 · MONTERINGSANVISNING

MONTERING PÅ BEFINTLIG TOALETSTOL

De följande sidorna beskriver hela det 12-stegsförlopp som gäller för montering av Bano Clean 700-bidésitsen på en befintlig toalettstol. Läs igenom hela förloppet innan monteringen påbörjas. Installationen ska utföras enligt gällande byggregler.

FAS 1 · STEG 1–5

MEKANISK

Demontera befintlig sits, fäst konsolen, justera skenan och klicka fast bidésitsen.

FAS 2 · STEG 6–8

VATTEN

Stäng av vattnet, montera T-kopplingen på cisternen och anslut matarslangen till sitsen.

FAS 3 · STEG 9–12

STRÖM

Sätt upp fjärrkontrollen, anslut strömmen, parkoppla enheten — produkten är klar.

**VIKTIGT — ANSLUT ALLTID VATTEN FÖRE STRÖM**

Sitsen får aldrig anslutas till strömmen förrän vattenanslutningen är tät och kontrollerad.

MEKANISK MONTERING

STEG 1 → 4

01 FÖRBERED DEMONTERA BEFINTLIG TOALETTSITS



Ta bort den nuvarande sitsen och rengör området runt fästhålen.

- ✓ Toalettstolen är ren och torr
- ✓ Fästhålen är fria


02 KONSOL FÄST MONTERINGSKONSOLEN



Använd de förmonterade maskinskruvarna, brickorna och vingmuttrarna.

- ✓ Konsolen är centrerad
- ✓ Vingmuttrarna ordentligt åtdragna


03 JUSTERA JUSTERA CLICK-ON-SKENAN

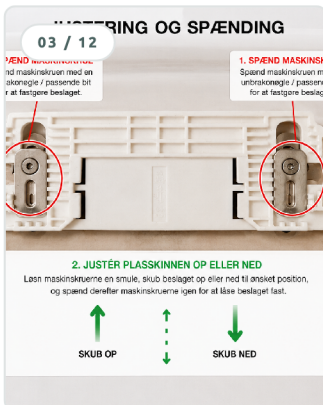

Avståndet från skenans bakkant till cisternens framkant ≈ 2 mm. Dra sedan åt de två stjärnskruvorna.

- ✓ Avstånd bakkant-cistern ≈ 2 mm
- ✓ Båda stjärnskruvorna är låsta

04 SITS PÅ MONTERA BIDÉSITSEN PÅ SKENAN

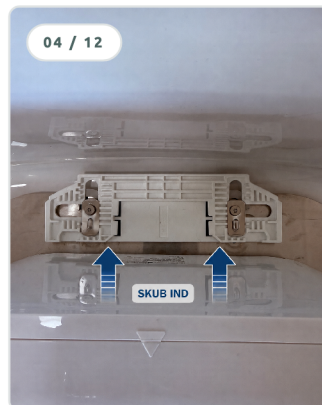

Låt sitsen glida över skenan tills den sitter helt bakåt. Ett litet klick bekräftar att den är låst.

- ✓ Sitsen är förd hela vägen in
- ✓ Klicket har hörts

KONTROLL & VATTENANSLUTNING

STEG 5 → 8

05 KONTROLL KONTROLLERA INFÄSTNINGEN



Dra lätt i sitsen. Spärrknappen ska vara helt ute och i plan med kåpan.

- ✓ Sitsen sitter fast
- ✓ Spärrknappen i plan

06 VATTEN AV STÄNG AV VATTENTILLFÖRSELN



Hitta avstängningsventilen och stäng den helt. Tappa av eventuellt resttryck via spolknappen.

- ✓ Avstängningsventilen är helt stängd
- ✓ Cisternen är trycklös

ANSLUT ALLTID VATTEN FÖRE STRÖM

Vattenanslutningen ska vara tät och kontrollerad innan strömmen ansluts.

VATTEN

→

STRÖM

07 T-STYCKE MONTERA T-KOPPLINGEN PÅ CISTERNEN



Skruva fast T-kopplingen på cisternens vattentillförsel. Använd eventuellt en skiftnyckel. Anslut avstängningsventilens slang till botten och anslutningsslangen till sidan.

- ✓ T-kopplingen fastskruvad på cisternen
- ✓ Avstängningsventil → botten · sits → sida
- ✓ Alla kopplingar efterdragna

08 TILL SITS ANSLUT ANSLUTNINGSSLANGEN TILL SITSEN



Skruva fast anslutningsslangen på sitsens vänstra vattenintag. Öppna vattnet och kontrollera tätheten.

- ✓ Ansluten till vänster intag
- ✓ Avstängningsventilen är öppnad
- ✓ Inga läckage


STRÖM & IGÅNGSÄTTNING

STEG 9 → 12

09

FJÄRRKONTROLL

SÄTT UPP FJÄRRKONTROLLEN

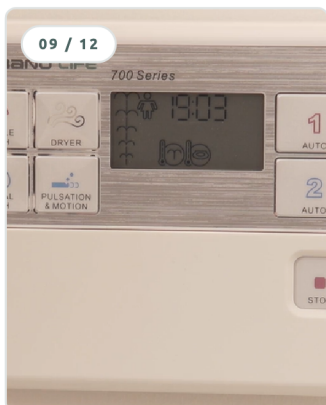

Montera vägghållaren i ögonhöjd (sittande) och sätt i fjärrkontrollen.

- ✓ Hållaren fastsatt
- ✓ Fjärrkontrollen i hållaren

10

STRÖM

ANSLUT STRÖMMEN OCH STARTA ENHETEN



Sätt stickkontakten i ett jordat vägguttag (Schuko, 230 V). Munstycksarmen körs in/ut — det är normalt.

- ✓ Jordat vägguttag
- ✓ Munstycksarmen har körts in/ut
- ✓ Hörbart

PIP

11

PARKOPPLING

PARKOPPLA FJÄRRKONTROLLEN



Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen **inom 10 sek.** efter strömanslutning.

- ✓ Knapp tryckt inom 10 sek.
- ✓ Sitsen reagerar

12

KLAR

PRODUKTEN ÄR KLAR ATT ANVÄNDAS



För funktioner, spolningstyper och inställningar hänvisas till de föregående avsnitten i denna manual samt till den medföljande snabbguiden.

- ✓ Bruksmanual — denna mapp
- ✓ Snabbguide medföljer
- ✓ banolife.se för support online


TEKNISKA RITNINGAR

BILAGA A — REFERENS

Måttritningar för BC-711 och BC-712. Alla mått i millimeter. Ritningarna är endast avsedda som referens — vid produktion används 3D CAD-modellen.

BC-711 · BANO CLEAN BIDÉSITS, VIT

PART# 801671 · R01 · 09-DEC-2025

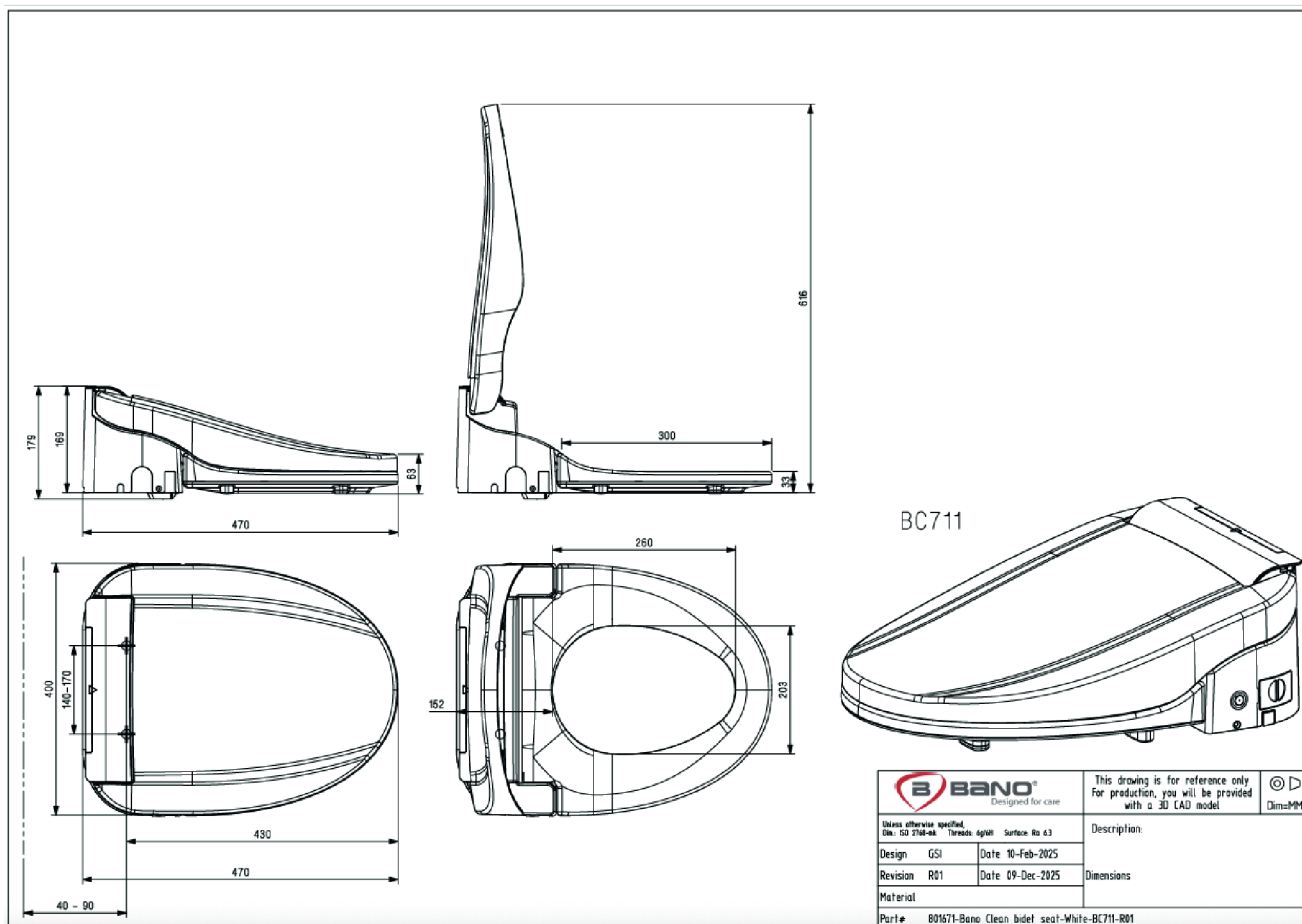


TEKNISKA RITNINGAR — BC-712

BILAGA A — REFERENS

Måttritning för BC-712. Alla mått i millimeter. Ritningen är endast avsedd som referens — vid produktion används 3D CAD-modellen.

BC-712 · BANO CLEAN BIDÉSITS, VIT

PART# 801608 · R01 · 05-DEC-2025

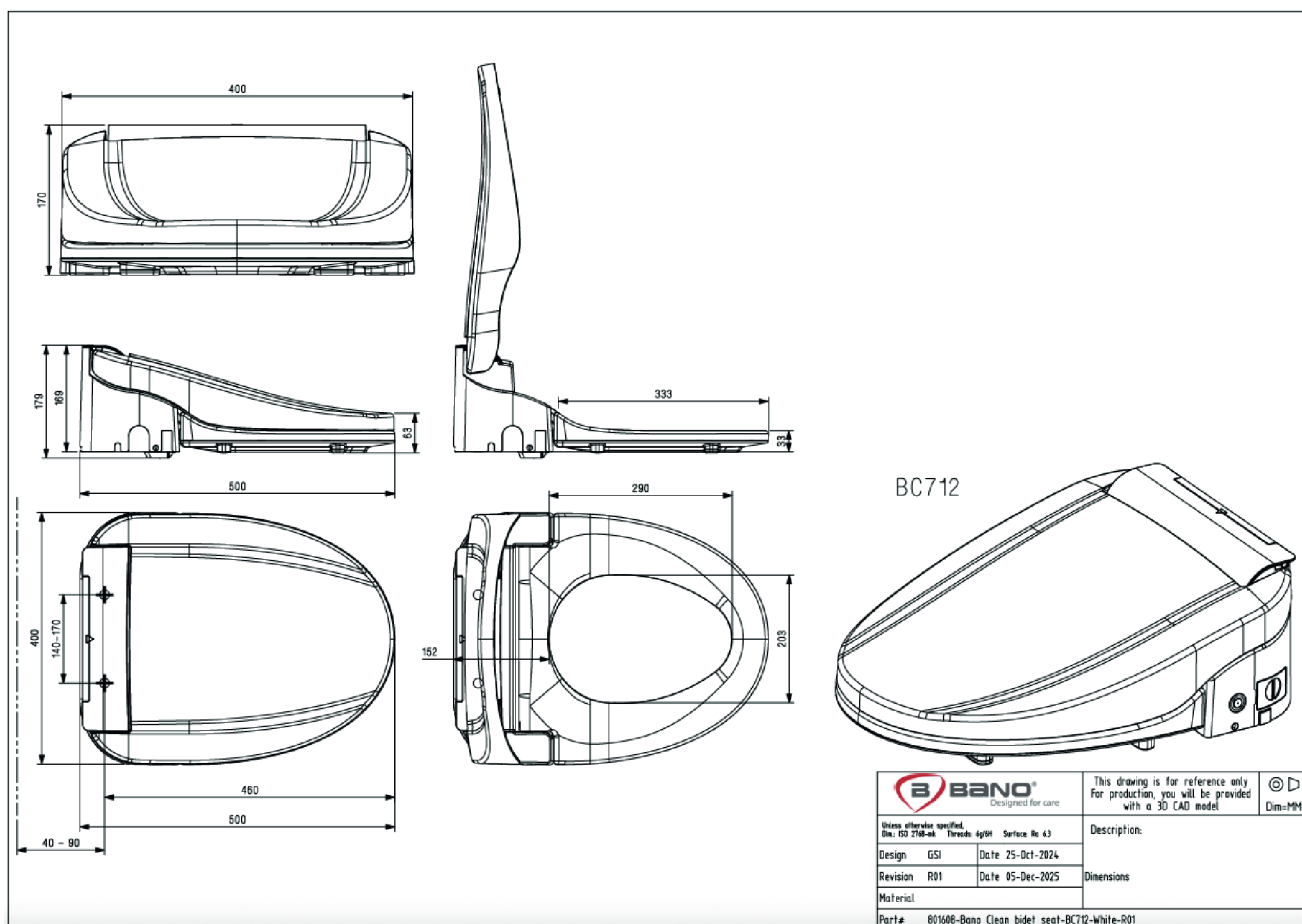

KONTAKT

BANO LIFE AB

E-POST

info@banolife.se

TELEFON

023-383 33 01

Försäljning 08-12 · 13-15 · Service 08-12

WEBB

banolife.se

ADRESS

Bergmästaregatan 14

791 30 Falun

KONTOR STOCKHOLM

Solna strandväg 74

171 54 Solna

SHOWROOM

Stockholm · Falun · Lidköping

banolife.se/annat/showrom

HYGIEN · KOMFORT · SJÄLVSTÄNDIGHET